

Plejevejledning til bag-øret høreapparater

For at sikre, at du kan høre godt hvor som helst og når som helst i over 5000 timer årligt, ønsker vi at give dig mulighed for trygt og sikkert at rengøre og pleje dine høreapparater.

Daglig rengøring

BEMÆRK:

Rengør dine høreapparater dagligt med en tør serviet. Tjek høreapparatet og opladningskontakterne, og fjern eventuelt voks og snavs. Rengør propperne til dine høreapparater én gang om ugen med en fugtig serviet med rengøringsprayen og lad dem tørre i ca. 3 minutter.

ADVARSEL




Undgå at spraye direkte på enheden.

Månedlig rengøring af propper – evt. i en kop

BEMÆRK:

Rengør propperne på dine høreapparater én gang om måneden.

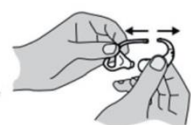

1. Fjern proppen fra dit høreapparat med en lille vridende bevægelse.



2. Fyld 3/4 af en kop med lunt vand.

3. Læg propper i en kop, og lad det stå i cirka 30 minutter.



4. Fjern propperne fra koppen og skyl med rent vand.



5. Tør propperne med en blød klud. Brug luftkuglen til at lufttørre eventuel resterende fugt på propperne og i røret. Monter propperne på dine høreapparater.

ADVARSEL




Hold hele tiden høreapparaterne tørre. Læg ikke høreapparaterne i vand/væske.


Månedlig kontrol af propper og slanger

BEMÆRK:


Undersøg dine slanger og propper for farveændringer, hærdning eller revner og udskift det, hvis det er nødvendigt.

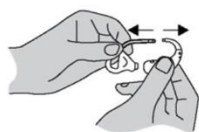


1. Fjern propper fra dit høreapparat med en lille vridende bevægelse.

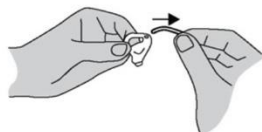

2. Fjern proppen fra slangen.

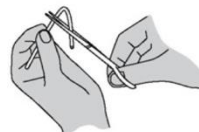

3. Klip et nyt stykke slange i samme længde.

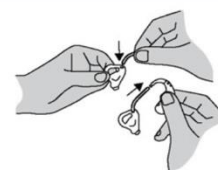

4. Skub den ene ende af slangen over tonekrogen på proppen. Skub den anden ende af slangen over tonekrogen på høreapparatet. Sørg for, at slangen sidder stramt i begge ender.

Genstart dine høreapparater

BEMÆRK:

Genstart dine høreapparater, hvis de er i en fejltilstand. Genstart fjerner eller sletter ikke noget program eller nogen indstillinger.

1. Tryk på den nederste del af multifunktionsknappen på enheden, indtil indikatorlyset er rødt.

2. Tryk på den nederste del af multifunktionsknappen på enheden igen, indtil indikatorlyset blinker grønt. Enheden er nulstillet, når indikatorlyset er grønt.

