

Viktig skötselguide för bakom-örat-apparat

För att du alltid ska kunna höra bra vill vi hjälpa dig att själv kunna rengöra och ta hand om dina hörapparater. Det ger hörapparaterna ökad livslängd och minskar risken för reparationer.

Daglig rengöring

Notera:

Rengör dina hörapparater dagligen med en torr trasa. Kontrollera öroninsatsen och laddkontakterna på hörapparaterna och ta bort vax och fukt. Rengör apparaterna en gång i veckan med en trasa fuktad med rengöringsspray och låt dem sedan lufttorka i cirka 3 minuter.

WARNING




Spraya inte rengöringssprayen direkt på hörapparaten.

Månatlig rengöring av insatsen i rengöringsburken

Notera:

Rengör öroninsatsen på dina hörapparater en gång i månaden med hjälp av rengöringsburken, rengöringstabletten och kanylblåsan.

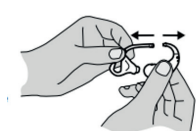

1. Ta bort insatsen från din hörapparat med en liten vridande rörelse.




2. Fyll 3/4 av rengöringsburken med varmt vatten och lägg i rengöringstabletten.

Placera insatsen i silen och placera den i rengöringsburken. Låt den ligga i blöt i cirka 30 minuter.



3. Ta upp insatsen från burken och skölj med rent vatten.

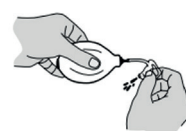

4. Torka insatsen med hjälp av en mjuk trasa. Använd kanylblåsan för att blåsa bort återstående fukt från insatsen och slangen. Återanslut insatsen till din hörapparat.

Häll ut rengöringsvätskan. Återanvänd inte.

WARNING




Håll alltid hörapparaterna torra. Lägg inte hörapparaterna i vätska!


Månatlig kontroll av ljudslangen

Notera:


Inspektera ljudslangen för att hitta färgförändringar, förhårdnader eller sprickor och byt ut den vid behov.

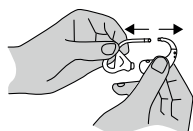


1. Ta bort insatsen från din hörapparat med en liten vridande rörelse.

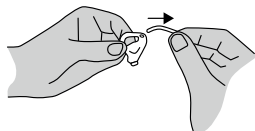

2. Ta bort slangen från insatsen.

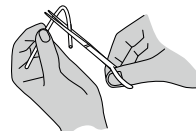

3. Klipp en ny bit av slangen till samma längd.

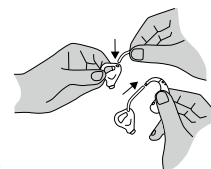

4. Trä på ena änden av slangen över slangfästet på insatsen. Trä den andra änden av slangen över hörapparatens fäste. Se till att slangen sitter tätt på båda ändar.

Starta om dina hörapparater

Notera:

Starta om dina hörapparater om de befinner sig i ett felläge. Omstart raderar inte något program eller inställningar.

1. Tryck på den nedre delen av multifunktionsknappen på hörapparaten tills indikatorljuset lyser rött.

2. Tryck igen på den nedre delen av multifunktionsknappen på hörapparaten tills indikatorljuset blinkar grönt. Hörapparaten har startat om när indikatorljuset lyser grönt.

Skanna
för video-
instruktion:

