



Onderhoudsinstructies

Luidspreker in het oor - oplaadbaar - oorstukje




Overzicht:

1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?
2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?
3. Hoe kan ik mijn filter A (cerustop) vervangen?
4. Hoe kan ik mijn filter B (HF3/4) vervangen?
5. Hoe kan ik mijn hoortoestellen en lader resetten?

1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?


Kleurmarkering op je hoortoestellen

Elk hoortoestel is afzonderlijk geprogrammeerd voor je rechter- of linkeroor. Voor de eerste stap dien je je rechter en linker hoortoestel te identificeren, zodat je jouw hoortoestel(len) in het juiste oor plaatst. Op de meeste hoortoestellen vind je op het rechterhoortoestel een **rode markering** en op het linkerhoortoestel een **blauwe markering**.

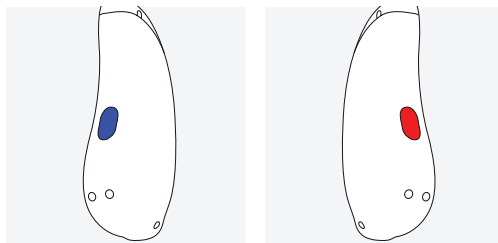

Hoe kan ik mijn hoortoestellen best indoen?


1. Kies het juiste hoortoestel
2. Het toestel met de **rode markering** hoort in je **rechteroor**, **blauw** is voor je **linkeroor**
3. Neem het hoortoestel vast aan het trekdraadje van het oorstukje, met de punt naar het oor.
4. Plaats de punt in je gehoorgang en druk het oorstukje met een draaibeweging aan.
5. Trek hierbij eventueel lichtjes je oorlel naar beneden.
6. Duw nu zacht tegen het oorstukje zodat dit volledig in je oorschelp komt te zitten
7. Schuif het hoortoestel vervolgens achter je oorschelp.
8. Je hoortoestel is correct geplaatst

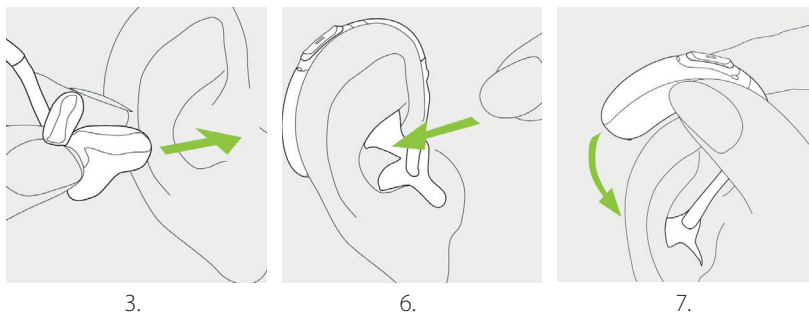

Let op: Controleer het oorstukje goed. Het mag niet uitsteken en geen pijn doen. Als het toestel goed zit en je het niet aanraakt, mag het niet meer fluiten.

Hoe kan ik mijn hoortoestellen best uitdoen?

1. Neem het trekdraadje van het oorstukje vast tussen duim en wijsvinger
2. Trek zachtjes met je vrije hand je oorlel naar beneden
3. Haal het hoortoestel rustig uit je oor met een lichte draaibeweging

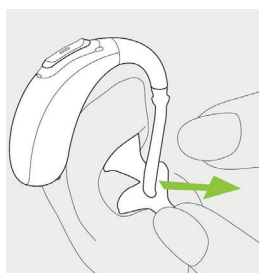

2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?

Je hoortoestellen en oorstukjes komen tijdens het dragen in contact met transpiratie, huidvetten en oorsmeer. Dat is perfect normaal. Door je hoortoestellen en de oorstukjes goed schoon te houden, voorkom je irritatie, jeuk en andere problemen in je gehoorgang en oorschelp. Wanneer je jouw hoortoestellen goed onderhoudt, heb je er ook langer plezier van.

Wat heb je nodig voor het onderhoud van je hoortoestellen?

- Reinigingsdoekjes of reinigingsspray
- CeruStop filter of HF3/4 filter
- Droogtabletten (indien van toepassing)

Een degelijke en regelmatige verzorging van je hoortoestellen en oplader zal bijdragen aan uitstekende prestaties tijdens de verwachte levensduur van je apparaten.

Algemene informatie

Voordat je haarlak of make-up gebruikt, dien je het hoortoestel uit je oor te halen, aangezien deze producten het toestel kunnen beschadigen. Je hoortoestellen zijn bestand tegen water, zweet en stof onder de volgende voorwaarden:

- Na blootstelling aan water, zweet of stof moet je de hoortoestellen schoonmaken en daarna drogen.
- De hoortoestellen worden gebruikt en onderhouden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Dagelijks onderhoud

Hoortoestellen

Inspecteer het oorstukje en de slang op oorsmeer en vocht. Reinig de oppervlakken met een pluisvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van je hoortoestellen. Het wordt afgeraden om deze onderdelen af te spoelen met water, omdat vocht hierdoor in de slang kan achterblijven. Vraag jouw audicien om advies wanneer je je hoortoestellen grondig dient te reinigen.

Oplader

Zorg dat de oplaadingangen schoon zijn. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van uw oplader.

Wekelijks onderhoud

Hoortoestellen

Reinig het oorstukje met een zachte, vochtige doek of met een speciale reinigingsdoek voor hoortoestellen. Voor meer uitvoerige onderhoudsinstructies of een intensievere reiniging kan je contact opnemen met jouw audicien.

Oplader

Verwijder stof of vuil vanuit de oplaadsleuven met een pluisvrije doek.

Maandelijks onderhoud





Inspecteer je akoestische slang op kleurveranderingen, verharding of scheuren. Indien dergelijke gebreken waargenomen worden, dien je de akoestische slang te vervangen. Raadpleeg hiervoor je audicien.

3. Hoe kan ik mijn filter A (cerustop) vervangen?

Je hoortoestellen zijn uitgerust met een cerumenfilter om de luidspreker te beschermen tegen schade door oorsmeer. Controleer de cerumenfilter regelmatig en vervang het als hij er vies uitziet of als het volume of de geluidskwaliteit van het hoortoestel achteruit gaat.


De cerumenfilter dient iedere vier tot acht weken te worden vervangen.

1. Gebruik een reinigingsdoekje of reinigingsspray om de hoortoestellen schoon te maken
2. Wanneer je na het reinigen nog oorsmeer op de luidspreker ziet, kan je de filter vervangen
3. Neem een Cerustop-filter uit het doosje en duw het staafje met de kant waar geen witte filter opzit in de filter van het oorstukje (insteken en uittrekken)
4. Draai het staafje vervolgens om en plaats de nieuwe filter door deze met het staafje recht in de luidspreker te duwen
5. De filter is nu vervangen en de gebruikte filter mag je nu weggooien.

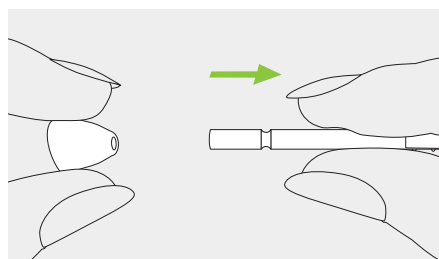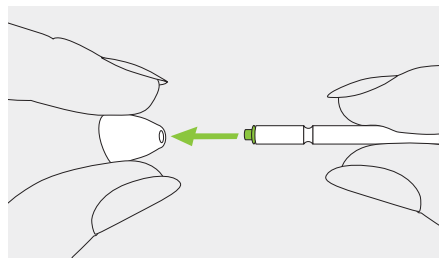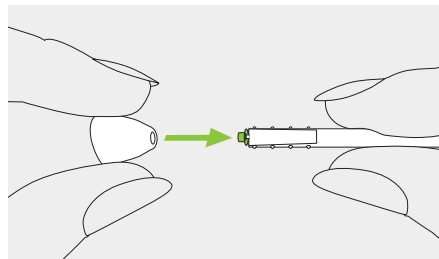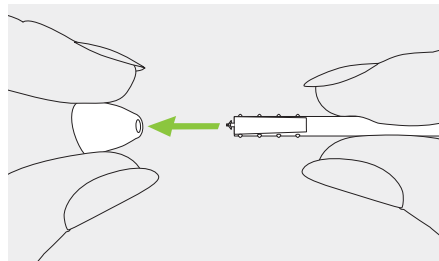


4. Hoe kan ik mijn filter B (HF3/4) vervangen?


Het gebruikte cerumenfilter verwijderen (HF3-filter)

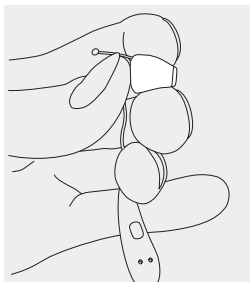


1. Hou het oorstukje goed vast en hou de achterkant van de speaker op zijn plaats met je vinger.

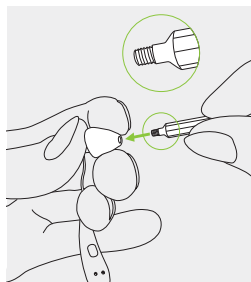


2. Plaats het uiteinde met schroef van het HF-3- vervangingstooltje in de speaker van het hoortoestel.

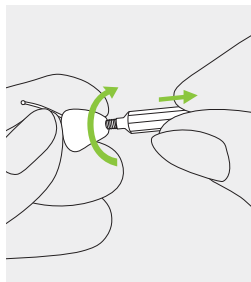

3. Roteer het vervangingshulpmiddel met de klok mee totdat enige weerstand voelbaar is. Verwijder het vervangingshulpmiddel uit de speaker met het gebruikte filter aan het uiteinde.

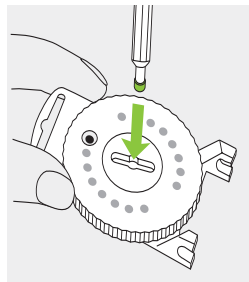


4. Plaats het gebruikte filter in de gleuf voor gebruikte filters in het midden van de houder voor cerumenfilters.

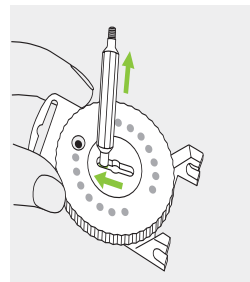


5. Schuif het vervangingstooltje naar één kant van de gleuf van de houder. Breng het vervangingstooltje omhoog, waardoor het gebruikte cerumenfilter in de gleuf van de houder achterblijft.


Een nieuw cerumenfilter plaatsen

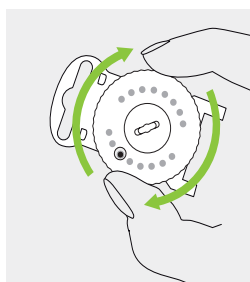


1. Na het verwijderen van het gebruikte cerumenfilter uit de speaker van het hoortoestel kan je het resterende vuil wegborstelen. Roteer de geribbelde schijf van de houder voor cerumenfilters totdat een nieuw filter zichtbaar is in het venster van de schijf.

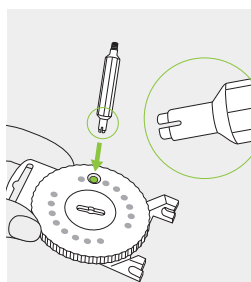


2. Gebruik nu het andere uiteinde van het vervangingstooltje (het gevorkte uiteinde) om een nieuw cerumenfilter op te pakken.

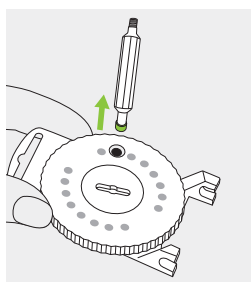

3. Plaats het gevorkte uiteinde van het vervangingstooltje in neerwaartse richting en breng deze omhoog.

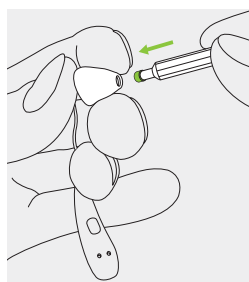

4. Plaats het nieuwe cerumenfilter in de speaker van het hoortoestel. Zorg ervoor dat je de achterkant van de speaker op zijn plaats houdt met je vinger.

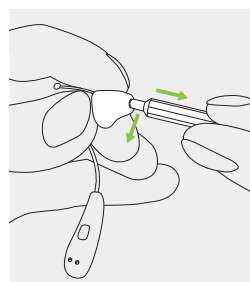

5. Wanneer het nieuwe filter stevig in de speaker is geplaatst, verwijder je het vervangingstooltje met een enigszins schuine hoek. Plaats het vervangingstooltje terug in de houder voor cerumenfilters.

5. Hoe kan ik mijn hoortoestellen en lader resetten?


Reset je oplaadbare hoortoestellen

Hoe kan je de oplaadbare hoortoestellen opnieuw opstarten wanneer deze niet reageren? (Wanneer deze bevroest)?

Je hoortoestellen opnieuw opstarten

Gebruik deze stappen wanneer je hoortoestellen niet meer reageren. Hiermee worden geen programma's of instellingen verwijderd.

1. Houd het onderste gedeelte van de knop ten minste 15 seconden ingedrukt. Het maakt niet uit of het hoortoestel uit- of ingeschakeld is voordat je de knop indrukt. Er zal na de 15 seconden geen lampje branden en er klinkt ook geen geluid.
2. Plaats het hoortoestel in de oplader die aangesloten is en wacht tot het indicatorlampje groen knippert. Dit kan tot 30 seconden duren. Je hoortoestellen kunnen nu worden gebruikt.

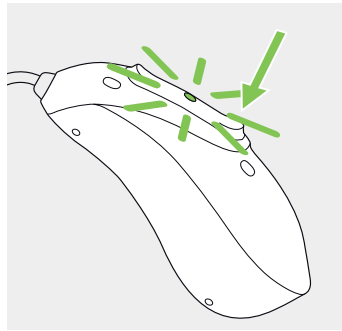

Reset oplader Phonak Charger Go

Volg onderstaande stappen als je je Phonak Charger Go lader wil resetten.

1. Haal je hoortoestellen uit de Phonak Charger Go
 2. Zorg ervoor dat de lader van de Phonak Charger Go ingepulgd is en in het stopcontact zit
 3. Zoek de resetknop aan de onderkant bij de rubberen ring aan de achterkant van de oplader (gaatje waar je de lader instopt)
 4. Gebruik een puntig gereedschap, b.v. paperclip of het stukje dat je bij je mobiele telefoon krijgt om je pinkkaart te verwijderen, om op de knop te drukken
 5. Houd de knop 8 seconden ingedrukt
 6. Laat de knop los wanneer de onderste LED van de batterij-indicator begint te knipperen/rood/groen/rood...
 7. Koppel de oplader los van de voedingsbron en sluit deze weer aan
- Je lader is nu gereset.

