

Plejevejledning: I-øret-høreapparater

Udskiftning af Cerustop-filter på den specialtilpassede prop

Brug denne vejledning om rengøring og pleje af i-øret-høreapparater og få det optimale ud af dine høreapparater.


Daglig rengøring

BEMÆRK: Rengør dine høreapparater dagligt med en tør serviet. Kontroller modtageren og opladningskontakterne på høreapparaterne, og fjern eventuelt voks og snavs. Rengør dine høreapparater én gang om ugen med en serviet med rengøringspray og lad dem tørre i ca. 3 minutter.


ADVARSEL  Undgå at spraye direkte på høreapparaterne.

Månedligt filterskift


BEMÆRK: Udskift filteret på din høreapparater én gang om måneden. Fjern det gamle og indsæt et nyt voksfilter ved hjælp af Cerustop-værktøjet.

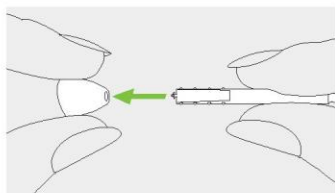


1. Indsæt udskiftningsværktøjet i det brugte filter. Holderens skaft skal røre ved kanten af høreapparatet.

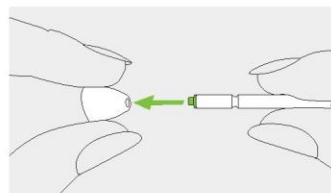

3. For at indsætte det nye filter skal du forsigtigt bruge udskiftningsværktøjet til at skubbe det nye filter direkte ind i højttalerens åbning.

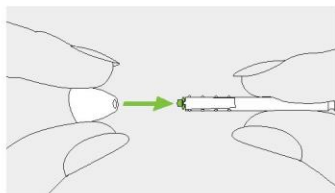

2. Træk og fjern forsigtigt filtret lige ud af højttaleren. Undgå at vride høreapparatet, når du fjerner filtret.

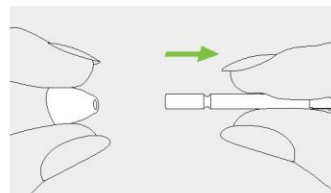

4. Træk værktøjet ud med en lige bevægelse. Det nye filter vil forblive på plads.

Video
Vejledning
tilgængelig:



Genstart dine høreapparater

BEMÆRK: Genstart dine høreapparater, hvis de er i en fejltilstand. Genstart fjerner eller sletter ikke noget program eller indstillinger.

1. Tryk på den nederste del af multifunktionsknappen på høreapparaterne, indtil indikatorlyset er rødt.

2. Tryk på den nederste del af multifunktionsknappen på høreapparaterne igen, indtil indikatorlyset blinker grønt. Høreapparaterne er nulstillet, når indikatorlyset er grønt.

Video
Vejledning
tilgængelig:



Hold styr på dit månedlige filterskift

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----