



Instructions d'entretien

Contour d'oreille - Rechargeable - Dôme

Aperçu :


1. Comment mettre et retirer correctement vos aides auditives ?
2. Comment entretenir correctement vos aides auditives ?
3. Comment remplacer le dôme (embout souple) ?
4. Comment réinitialiser vos aides auditives ?



1. Comment puis-je mettre et retirer mes aides auditives de la meilleure façon ?


Marquage de couleur sur vos aides auditives

Chaque aide auditive est programmée individuellement pour votre oreille droite ou gauche. La première étape consiste à identifier votre aide auditive droite et gauche afin de placer vos aides auditives dans la bonne oreille. Sur la plupart des aides auditives, vous trouverez un **marquage rouge** sur l'aide auditive droite et un **marquage bleu** sur l'aide auditive gauche.

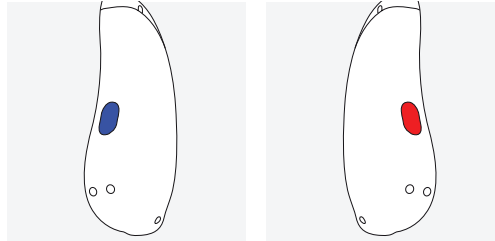


Comment mettre correctement mes aides auditives ?

1. Choisissez la bonne aide auditive.
2. L'appareil avec **la marque rouge** va dans votre **oreille droite**, **le bleu** dans votre **oreille gauche**.
3. Glissez l'appareil auditif derrière votre pavillon.
4. Tenez la courbure du tube fin entre votre pouce et votre index. Le tube ou l'embout doit pointer vers l'ouverture de votre conduit auditif.
5. Placez l'embout délicatement dans votre conduit auditif.
6. Poussez l'embout suffisamment profondément dans votre conduit auditif avec le bout de votre index.
 - a. Optionnel : Si un petit fil est attaché à l'embout, placez-le dans votre pavillon pour fixer l'appareil auditif solidement.
7. L'appareil est bien positionné lorsque le petit fil du tube fin repose bien contre le côté de votre tête.
8. Lorsque l'appareil auditif est bien en place et que vous ne le touchez plus, il ne doit pas siffler.

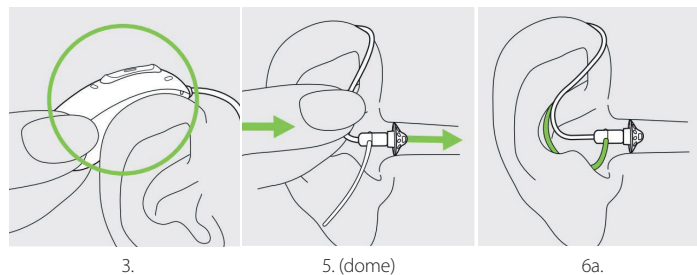

Comment retirer correctement mes aides auditives ?

1. Tenez l'appareil auditif par le petit tube et retirez-le délicatement de votre oreille.
2. Tirez doucement sur votre lobe d'oreille vers le bas avec votre main libre.

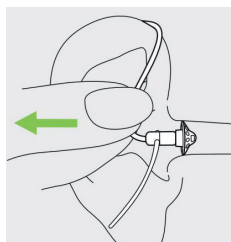

2. Comment puis-je entretenir mes aides auditives de la meilleure façon ?

Vos aides auditives et embouts entrent en contact avec la transpiration, les graisses cutanées et le cérumen pendant leur utilisation. Cela est tout à fait normal. En gardant vos aides auditives et les embouts propres, vous évitez les irritations, les démangeaisons et d'autres problèmes dans votre conduit auditif et pavillon. Un bon entretien de vos aides auditives vous permettra également de les utiliser plus longtemps.

De quoi avez-vous besoin pour l'entretien de vos aides auditives ?

- Lingettes de nettoyage ou spray de nettoyage
- Tubes fins
- Embouts/dômes
- Pastilles de séchage ou boîte de séchage

Un entretien régulier et soigné de vos aides auditives et de votre chargeur contribuera à d'excellentes performances pendant la durée de vie prévue de vos appareils.

Informations générales

Avant d'utiliser de la laque ou du maquillage, vous devez retirer votre aide auditive de votre oreille, car ces produits peuvent endommager l'appareil. Vos aides auditives sont résistantes à l'eau, à la sueur et à la poussière sous les conditions suivantes :

- Après exposition à l'eau, à la sueur ou à la poussière, vous devez nettoyer et sécher vos aides auditives.
- Les aides auditives doivent être utilisées et entretenues comme décrit dans ce manuel d'utilisation.

Entretien quotidien

Aides auditives

Inspectez l'embout et le tube pour vérifier la présence de cérumen et d'humidité. Nettoyez les surfaces avec un chiffon non pelucheux. N'utilisez jamais de produits de nettoyage tels que des détergents ménagers, du savon, etc., pour nettoyer votre aide auditive. Il est déconseillé de rincer ces pièces à l'eau, car l'humidité pourrait rester dans le tube. Demandez conseil à votre audioprothésiste pour un nettoyage en profondeur de votre aide auditive. Placez vos aides auditives quotidiennement dans la boîte de séchage ou la boîte de séchage avec pastille de séchage prévue à cet effet.

Entretien hebdomadaire

Aides auditives

Nettoyez l'embout avec un chiffon doux et un spray de nettoyage ou avec une lingette spéciale pour aides auditives. Nettoyez également les points de contact pour le chargement de votre aide auditive.

Entretien mensuel


Inspectez votre tube fin pour détecter tout changement de couleur, durcissement ou fissure. Si de tels défauts sont constatés, le tube fin doit être remplacé.

3. Comment puis-je remplacer mon dôme (embout doux) ?


Comment remplacer mon dôme (embout souple) et le filtre ?

Votre aide auditive est équipée d'un dôme (embout souple). Vérifiez l'embout et remplacez-le ou nettoyez-le s'il semble sale ou si le volume ou la qualité sonore de l'aide auditive diminue. Le dôme doit être remplacé tous les mois.


Retirer le dôme (embout souple) du tube fin

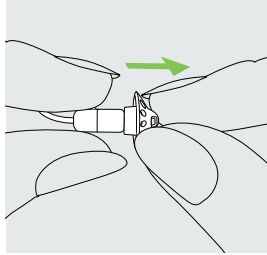

1. Retirez le dôme (embout souple) du tube en tenant le tube dans une main et l'embout dans l'autre

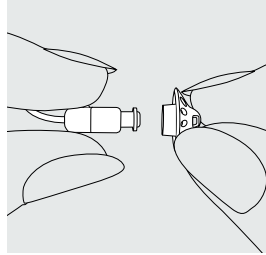


2. Tirez doucement sur le dôme (embout souple) pour le retirer

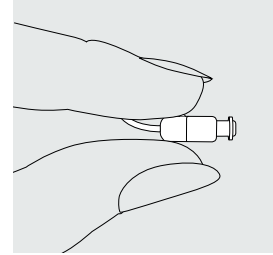


3. Nettoyez le tube avec un chiffon non pelucheux.


Placer le dôme (embout souple) sur le tube fin

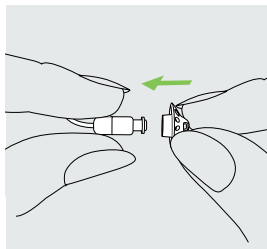

1. Tenez le tube dans une main et le dôme (embout souple) dans l'autre

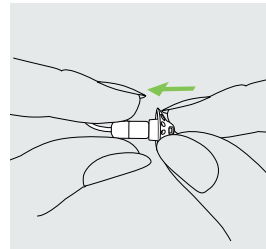

2. Faites glisser le dôme (embout souple) sur le tube.

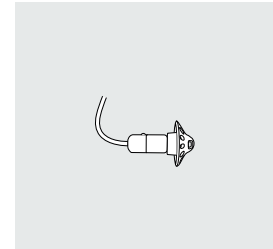

3. Le tube et le dôme (embout souple) doivent s'emboîter parfaitement.

4. Comment réinitialiser vos aides auditives ?

Suivez les étapes ci-dessous si vos aides auditives affichent un statut d'erreur.

Les programmes ou paramètres ne seront pas supprimés.

1. Maintenez enfoncé le bas de la touche multifonction pendant au moins 15 secondes. Peu importe si l'aide auditive est allumée ou éteinte avant d'appuyer sur le bouton. Aucune lumière ne s'allume et aucun signal sonore n'est émis lorsque les 15 secondes sont écoulées.
2. Placez les aides auditives dans le chargeur connecté à l'alimentation secteur et attendez que le voyant indique une lumière verte clignotante. Cela peut prendre jusqu'à 30 secondes. Les aides auditives sont maintenant prêtes à être utilisées.