



Onderhoudsinstructies

Volledig in het oor - batterijen

Overzicht:


1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?
2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?
3. Hoe kan ik de filter vervangen van mijn hoortoestellen?
4. Hoe kan ik de batterijen van mijn hoortoestellen vervangen?



1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?


Kleurmarkering op je hoortoestellen

Elk hoortoestel is afzonderlijk geprogrammeerd voor je rechter- of linkeroor. Voor de eerste stap dien je je rechter en linker hoortoestel te identificeren, zodat je jouw hoortoestel(len) in het juiste oor plaatst. Op de meeste hoortoestellen vind je op het rechterhoortoestel een **rode markering** en op het linkerhoortoestel een **blauwe markering**.

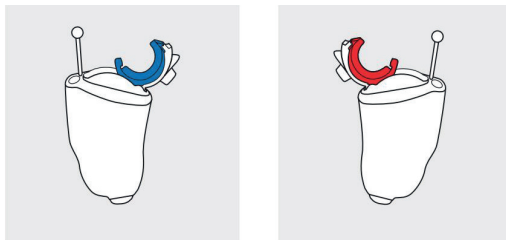

Hoe kan ik mijn hoortoestellen best indoen?


1. Kies het juiste hoortoestel
2. Het toestel met de **rode markering** hoort in uw **rechteroor**, **blauw** is voor uw **linkeroor**
3. Sluit het batterijklepje volledig alvorens u het hoortoestel in uw oor plaatst
4. Neem het hoortoestel vast (aan het trekdraadje) tussen duim en wijsvinger.
Het trekdraadje zit aan de onderkant
5. Plaats de punt in uw gehoorgang en druk het hoortoestel op zijn plaats.
6. Trek hierbij eventueel lichtjes aan uw oorlel
7. Duw nu zachtjes tegen het hoortoestel zodanig deze volledig in de gehoorgang komt te zitten

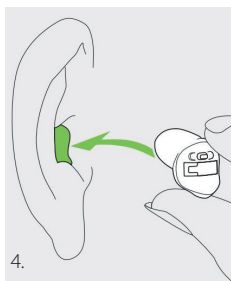

Hoe kan ik mijn hoortoestellen best uitdoen?


Met een trekkoordje:

1. Neem het trekdraadje vast tussen duim en wijsvinger
2. Trek zachtjes het hoortoestel uit uw oor
3. Open het batterijklepje volledig alvorens u ze in het opbergdoosje of de Drybox legt.

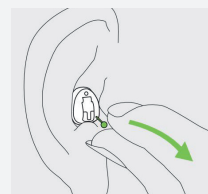

Zonder een trekkoordje:

1. Plaats uw duim achter uw oorlel en druk uw oor voorzichtig omhoog om zo het hoortoestel uit het oor te duwen. Om het makkelijker uit het oor te krijgen, kunt u kauwbewegingen maken.
2. Pak uw hoortoestel tussen duim en wijsvinger vast en verwijder het.
3. Open het batterijklepje volledig alvorens u ze in het opbergdoosje of de Drybox legt.

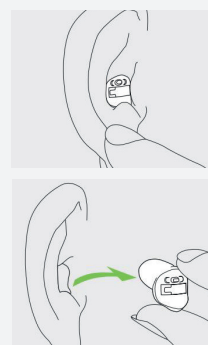

2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?

Je hoortoestellen en dopjes komen tijdens het dragen in contact met transpiratie, huidvetten en oorsmeer. Dat is perfect normaal. Door je hoortoestellen en het dopjes goed schoon te houden, voorkom je irritatie, jeuk en andere problemen in je gehoorgang en oorschelp. Wanneer je jouw hoortoestellen goed onderhoudt, heb je er ook langer plezier van.

Gebruik regelmatig de reinigingsdoekjes. Ze zijn bedoeld om uw hoortoestellen te reinigen en te ontsmetten. Hetzelfde effect krijgt u door wat reinigingsspray op een zacht doekje te verstuiwen. Spray nooit rechtstreeks op het hoortoestel, maar altijd eerst op een doekje. Gebruik zeker geen water, want dat kan de kwetsbare elektronische onderdelen beschadigen.

Wat heb je nodig voor het onderhoud van je hoortoestellen?

- Reinigingsdoekjes of reinigingsspray
- Filters (Cerustop, HF3- of HF4-filters)
- Drybox

Een degelijke en regelmatige verzorging van je hoortoestellen en oplader zal bijdragen aan uitstekende prestaties tijdens de verwachte levensduur van je apparaten.

3. Hoe kan ik de filter vervangen van mijn hoortoestellen?

Stappenplan voor het onderhoud met een Cerustop-filter

1. Controleer uw hoortoestel op vuil en oorsmeer
2. Gebruik een reinigingsdoekje of reinigingsspray om het hoortoestel schoon te maken
3. Neem vervolgens een staafje met filter
4. Verwijder de gebruikte filter door de lege kant van het staafje zachtjes in het midden van de witte filter te plaatsen. Als u het staafje er terug uithaalt komt de gebruikte filter mee
5. Draai het staafje vervolgens om en plaats de nieuwe filter in de luidspreker door deze recht in het oorstukje te duwen
6. De filter is nu vervangen, de gebruikte filter mag u nu weggooien
7. Haal de batterij uit uw hoortoestel en leg het hoortoestel met het batterijklepje open in de Drybox
8. Druk op de knop om de Drybox in werking te zetten
9. Sluit vervolgens de Drybox
10. Uw toestel is nu gereinigd en zal verder drogen in de Drybox (gedurende 5 uur)

Stappenplan voor het onderhoud met HF3- en HF4-filters


1. Controleer uw hoortoestel op vuil en oorsmeer
2. Gebruik een reinigingsdoekje of reinigingsspray om het hoortoestel schoon te maken
3. Neem het draaischijfje met de HF4-filters op en draai het wielje van de filter naar een gaatje waar nog een filter inzit
4. Trek het meegeleverde staafje uit de draaischijf en prik met de kant waar geen schroefdraad inzit in het gaatje om een nieuwe filter te nemen
5. Keer het staafje om en draai met de schroefdraad de oude filter eruit (insteken en draaien)
6. Draai het staafje vervolgens opnieuw om en plaats de nieuwe filter door deze met het staafje recht in de luidspreker te duwen
7. De filter is nu vervangen en de gebruikte filter mag u nu weggooien7 Haal de batterij uit uw hoortoestel en leg het hoortoestel met het batterijklepje open in de Drybox
8. Druk op de knop om de Drybox in werking te zetten
9. Sluit vervolgens de Drybox
10. Uw toestel is nu gereinigd en zal verder drogen in de Drybox (gedurende 5 uur)

4. Hoe kan ik de batterijen van mijn hoortoestellen vervangen?

Uw hoortoestel geeft met een dubbele pieptoon aan dat de batterij binnenkort vervangen moet worden. U heeft meestal 30 minuten om de batterij te vervangen, maar dit verschilt nog weleens en kan ook aanzienlijk korter zijn. Wij raden u aan om steeds een reservebatterij bij de hand te hebben.

Het vervangen van de batterij

1. Neem het hoortoestel in uw hand en open de batterijlade
2. Neem een nieuwe batterij
3. Verwijder het klevertje van de nieuwe batterij en wacht 1 minuut
4. Plaats de batterij zo dat u het + symbool ziet op de batterij
5. Schakel het hoortoestel in door de batterijlade te sluiten
6. Het hoortoestel is nu ingeschakeld. Het kan 15 seconden duren voor het start.
(Wanneer u het hoortoestel draagt, hoort u een akoestisch signaal)

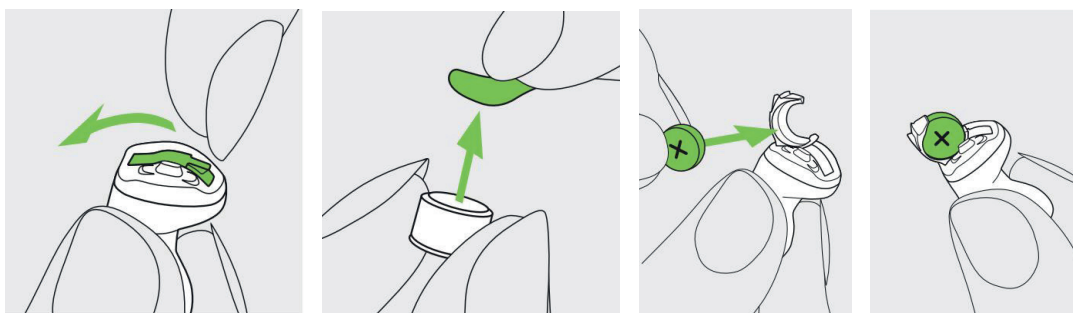

Tip: Controleer of u weerstand voelt bij het sluiten van de batterijlade. Als u weerstand voelt, controleer dan of de batterij goed en in de juiste richting geplaatst is. Indien de batterij verkeerd geplaatst is, zal het hoortoestel niet werken en kan de batterijlade beschadigd raken.