

Plejevejledning for filterskift i-øret-høreapparater

Cerustop filterskift

For at sikre, at du kan høre godt hvor som helst og når som helst i over 5000 timer årligt, ønsker vi at give dig mulighed for trygt og sikkert at rengøre og pleje dine høreapparater.

Daglig rengøring

BEMÆRK:

Rengør dine høreapparater dagligt med en tør serviet. Kontroller filter, propper og opladningsmodtager på høreapparaterne og fjern eventuelt voks og snavs. Rengør dine høreapparater én gang om ugen med en serviet med rengøringsprayen og lad dem tørre i ca. 3 minutter.

Video
Vejledning
tilgængelig:



ADVARSEL



Undgå at spraye direkte på høreapparaterne. Brug ikke rengøringsprayen på propperne.

Månedligt propskifte

BEMÆRK:

Udskift propperne på dine høreapparater én gang om måneden. For at fjerne proppen, skal du klemme på side og trække den af. Påfør derefter en ny prop.


Video
Vejledning
tilgængelig:




Månedligt filterskift

BEMÆRK:


Udskift filteret på dine høreapparater én gang om måneden. Fjern det gamle og indsæt et nyt voksfilter ved hjælp af Cerustop-værktøjet.

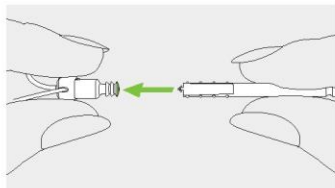

1. Indsæt udskiftningsværktøjet i det brugte filter. Holderens skaft skal røre ved kanten af højttaleren.

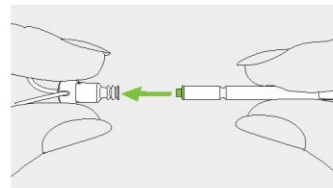

2. Træk og fjern forsigtigt filtret lige ud af højttaleren. Undgå at vride filtret, når du fjerner det.

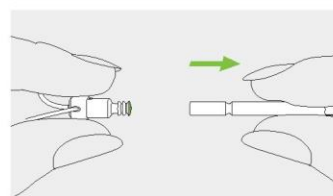

3. For at indsætte det nye filter skal du forsigtigt bruge udskiftningsværktøjet til at skubbe det nye filter direkte ind i højttalerens åbning.

4. Træk værktøjet ud med en lige bevægelse. Det nye filter vil forblive på plads. Sæt nu din prop på højttaleren.

Video
Vejledning
tilgængelig:



Genstart dine høreapparater

BEMÆRK:

Genstart dine høreapparater, hvis de er i en fejltilstand. Genstart fjerner eller sletter ikke noget program eller nogen indstillinger.

1. Tryk på den nederste del af multifunktionsknappen på høreapparaterne, indtil indikatorlyset er rødt.

2. Tryk på den nederste del af multifunktionsknappen på høreapparaterne igen, indtil indikatorlyset blinker grønt. Høreapparaterne er nulstillet, når indikatorlyset er grønt.

Video
Vejledning
tilgængelig:



Hold styr på dit månedlige prop- og filterskift

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----