



Onderhoudsinstructies

Luidspreker in het oor - oplaadbaar - dome

Overzicht:


1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?
2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?
3. Hoe kan ik mijn filter en dome vervangen?
4. Hoe kan ik mijn hoortoestellen en lader resetten?



1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?


Kleurmarkering op je hoortoestellen

Elk hoortoestel is afzonderlijk geprogrammeerd voor je rechter- of linkeroor. Voor de eerste stap dien je je rechter en linker hoortoestel te identificeren, zodat je jouw hoortoestel(len) in het juiste oor plaatst. Op de meeste hoortoestellen vind je op het rechterhoortoestel een **rode markering** en op het linkerhoortoestel een **blauwe markering**.

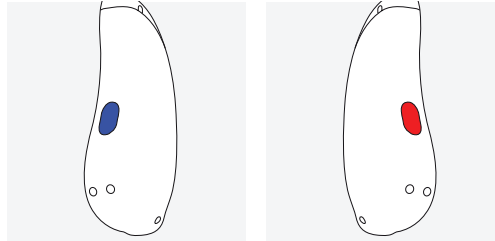

Hoe kan ik mijn hoortoestellen best indoen?

1. Kies het juiste hoortoestel
2. Het toestel met de **rode markering** hoort in je **rechteroor**, **blauw** is voor je **linkeroor**
3. Schuif het hoortoestel achter je oorschelp
4. Hou de bocht van de luidsprekerdraad tussen je duim en wijsvinger.
De luidspreker of dopje moet wijzen in de richting van de opening van je gehoorgang
5. Plaats de luidspreker nu voorzichtig in je gehoorgang
6. Duw met het topje van je wijsvinger de luidspreker voldoende diep in je gehoorgang
 - a. Optioneel: Als er een draadje aan het dopje zit, plaatst je deze in je oorschelp om het hoortoestel stevig te plaatsen
7. Het toestel zit goed wanneer het kabeltje van de luidspreker goed aansluit tegen de zijkant van je hoofd
8. Wanneer het hoortoestel goed zit en je het niet meer aanraakt, mag het niet meer fluiten

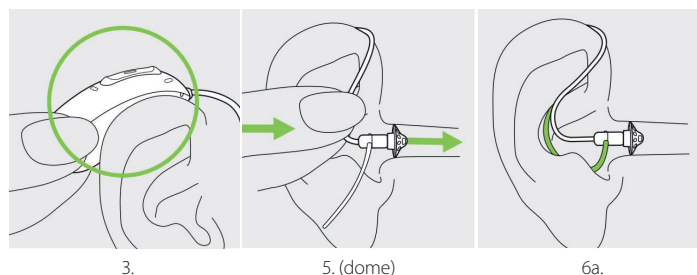


3.

5. (dome)

6a.

Hoe kan ik mijn hoortoestellen best uitdoen?

1. Neem het hoortoestel vast bij het slangetje en neem het voorzichtig uit je oor
2. Trek zachtjes met je vrije hand je oorlel naar beneden

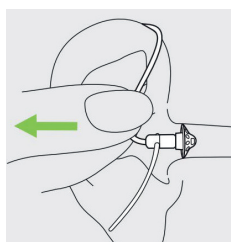

2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?

Je hoortoestellen en dopjes komen tijdens het dragen in contact met transpiratie, huidvetten en oorsmeer. Dat is perfect normaal. Door je hoortoestellen en het dopjes goed schoon te houden, voorkom je irritatie, jeuk en andere problemen in je gehoorgang en oorschelp. Wanneer je jouw hoortoestellen goed onderhoudt, heb je er ook langer plezier van.

Wat heb je nodig voor het onderhoud van je hoortoestellen?

- Reinigingsdoekjes of reinigingsspray
- Filters (Cerushield Disk)
- Dopjes/domes
- Droogtabletten (indien van toepassing)

Een degelijke en regelmatige verzorging van je hoortoestellen en oplader zal bijdragen aan uitstekende prestaties tijdens de verwachte levensduur van je apparaten.

Algemene informatie

Voordat je haarlak of make-up gebruikt, dien je het hoortoestel uit je oor te halen, aangezien deze producten het toestel kunnen beschadigen. Je hoortoestellen zijn bestand tegen water, zweet en stof onder de volgende voorwaarden:

- Na blootstelling aan water, zweet of stof moet je de hoortoestellen schoonmaken en daarna drogen.
- De hoortoestellen worden gebruikt en onderhouden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Dagelijks onderhoud

Hoortoestellen

Inspecteer het dopje en de luidspreker op oorsmeer en vochtafzettingen en reinig de oppervlakken met een pluisvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van je hoortoestellen. Het wordt niet aangeraden de hoortoestellen met water af te spoelen. Indien je de hoortoestellen grondig dient te reinigen, kan je advies en informatie vragen aan jouw audicien over filters of manieren van drogen.

Oplader

Zorg dat de oplaadingangen schoon zijn en reinig de oppervlakken met een pluisvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van je oplader.

Wekelijks onderhoud

Hoortoestellen

Reinig het dopje met een zacht doekje en reinigingsspray of met een speciale reinigingsdoek voor hoortoestellen. Reinig ook de contactpunten voor het opladen op je hoortoestel.

Oplader

Verwijder stof of vuil met een pluisvrije doek uit de oplaadingangen. Zorg er altijd voor dat de hoortoestellen en oplader droog en schoon zijn voordat je begint met opladen.

Maandelijks onderhoud


- Vervang de filter en het dopje elke maand tijdens de reiniging.
- Indien van toepassing, vervang de droogtablet in de lader. Indien deze droogtablet opgebruikt is, zal de kleur veranderen naar wit. De gebruikte droogtablet mag in de prullenbak

3. Hoe kan ik mijn filter en dome vervangen?


Hoe moet ik mijn dome (zacht dopje) en filter vervangen?

Je hoortoestellen zijn uitgerust met een cerumenfilter om de luidspreker te beschermen tegen schade door oorsmeer. Controleer de cerumenfilter regelmatig en vervang deze als hij er vies uit ziet of als het volume of de geluidskwaliteit van je hoortoestellen achteruit gaan. De cerumenfilter dient iedere vier weken te worden vervangen op een normale luidspreker en iedere week tot twee weken op een ActiveVent™ Receiver.


De dome (zacht dopje) van de luidspreker verwijderen

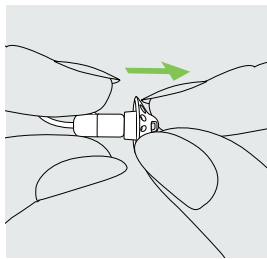

1. Verwijder de dome (zacht dopje) van de luidspreker door de luidspreker in de ene hand te houden en de dome (zacht dopje) in de andere.

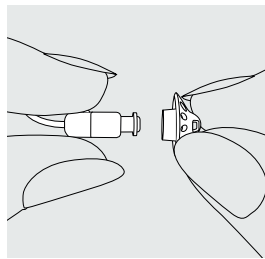


2. Trek zachtjes aan de dome (zacht dopje) om deze te verwijderen.

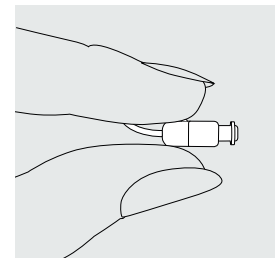


3. Reinig de luidspreker met een pluisvrije doek

De cerumenfilter vervangen met CeruShield™ Disk

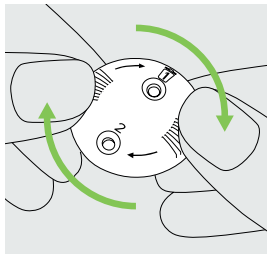

1. Draai de CeruShield Disk voorzichtig in de richting die met de pijlen wordt aangegeven totdat er een vrije ruimte onder het prullenbak-pictogram verschijnt.

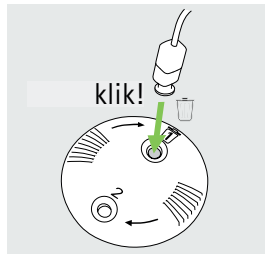


2. Om een gebruikte cerumenfilter te vervangen, plaatst je de luidspreker in de vrije ruimte (onder het prullenbak-pictogram) tot deze vastklikt. De gebruikte cerumenfilter blijft in de disk wanneer je de luidspreker opheft.




3. Om een nieuwe cerumenfilter in te voeren, plaats je de luidspreker voorzichtig in de opening waar de nieuwe cerumenfilter zichtbaar is (tegenover het prullenbak-pictogram) tot deze vastklikt. Til de luidspreker op van de disk. De nieuwe cerumenfilter bevindt zich nu in de luidspreker.


De dome (zacht dopje) op de speaker plaatsen

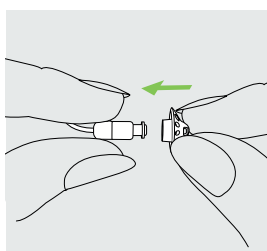

1. Hou de luidspreker in de ene hand en de dome (zacht dopje) in de andere.

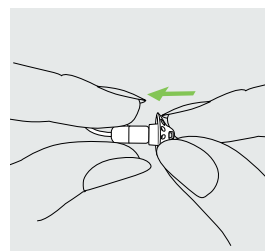

2. Schuif de dome (zacht dopje) over de geluidsuitgang van de luidspreker

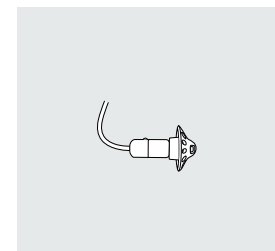

3. De luidspreker en de dome (zacht dopje) zouden perfect in elkaar moeten passen.

4. Hoe kan ik mijn hoortoestellen en lader resetten?


Reset je oplaadbare hoortoestellen

Hoe kan je de oplaadbare hoortoestellen opnieuw opstarten wanneer deze niet reageren? (Wanneer deze bevroest)?

Je hoortoestellen opnieuw opstarten

Gebruik deze stappen wanneer je hoortoestellen niet meer reageren. Hiermee worden geen programma's of instellingen verwijderd.

1. Houd het onderste gedeelte van de knop ten minste 15 seconden ingedrukt. Het maakt niet uit of het hoortoestel uit- of ingeschakeld is voordat je de knop indrukt. Er zal na de 15 seconden geen lampje branden en er klinkt ook geen geluid.
2. Plaats de hoortoestellen in de oplader die aangesloten is en wacht tot het indicatorlampje groen knippert. Dit kan tot 30 seconden duren. Je hoortoestellen kunnen nu gebruikt worden.

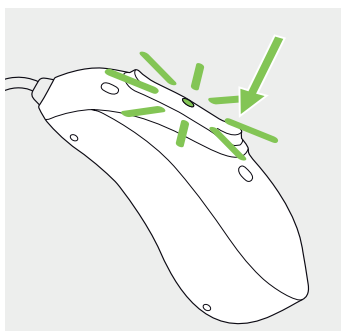

Reset oplader Phonak Charger Go

Volg onderstaande stappen als je je Phonak Charger Go lader wil resetten.

1. Haal je hoortoestellen uit de Phonak Charger Go
 2. Zorg ervoor dat de lader van de Phonak Charger Go ingepulgd is en in het stopcontact zit
 3. Zoek de resetknop aan de onderkant bij de rubberen ring aan de achterkant van de oplader (gaatje waar je de lader instopt)
 4. Gebruik een puntig gereedschap, b.v. paperclip of het stukje dat je bij je mobiele telefoon krijgt om je pinkkaart te verwijderen, om op de knop te drukken
 5. Houd de knop 8 seconden ingedrukt
 6. Laat de knop los wanneer de onderste LED van de batterij-indicator begint te knipperen/rood/groen/rood...
 7. Koppel de oplader los van de voedingsbron en sluit deze weer aan
- Je lader is nu gereset.

