

Vigtig plejevejledning i-øret høreapparater

Cerustop filterskift

For at sikre, at du kan høre godt hvor som helst og når som helst i over 5000 timer årligt, ønsker vi at give dig mulighed for trygt og sikkert at rengøre og pleje dine høreapparater.


Daglig rengøring

BEMÆRK: Rengør dine høreapparater dagligt med en tør serviet. Tjek propper og filtre og fjern eventuelt voks og snavs. Rengør dine høreapparater én gang om ugen med en serviet med rengøringsprayen og lad dem tørre i ca. 3 minutter.


ADVARSEL  Spray ikke rengøringsprayen direkte på høreapparaterne!

Månedligt filterskift


BEMÆRK: Udskift filteret på din enhed en gang om måneden. Fjern det gamle og indsæt et nyt voksfilter ved hjælp af Cerustop-værktøjet.

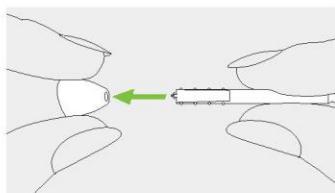


1.
Indsæt udskiftningsværktøjet i det brugte filter. Holderens skaft skal røre ved kanten af høreapparatet.

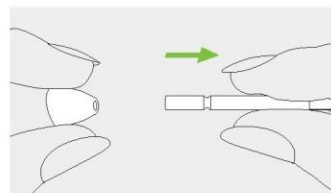

4.
Træk værktøjet ud med en lige bevægelse. Det nye filter vil forblive på plads.

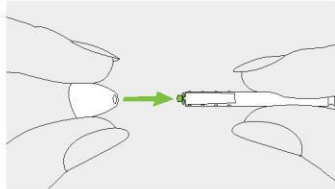

2.
Træk og fjern forsigtigt filtret lige ud af højttaleren. Undgå at vride filtret, når du fjerner den.

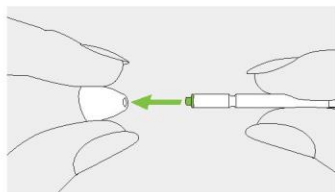

3.
For at indsætte det nye filter skal du forsigtigt skubbe udskiftningsværktøjet lige ind i højttalerens åbning.

Video
Vejledning
tilgængelig:



Hold styr på dit månedlige filterskift

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----