

Viktig skötselguide för Receiver-in-canal-hörapparater (RIC)

EasyGuard™ dome

För att du alltid ska kunna höra bra vill vi hjälpa dig att själv kunna rengöra och ta hand om dina hörapparater. Det ger hörapparaterna ökad livslängd och minskar risken för reparationer.

Daglig rengöring

Notera:


Rengör dina hörapparater dagligen med en torr trasa. Kontrollera hörtelefonen och laddkontakterna på hörapparaterna och ta bort vax och skräp. Rengör apparaterna en gång i veckan med en trasa fuktad med rengöringsspray och låt dem sedan lufttorka i cirka 3 minuter.

Skanna
för video-
instruktion:


**WARNING**

Spraya inte rengöringssprayen direkt på hörapparaten. Använd inte rengöringsspray på domerna.


EasyGuard™ domebyte

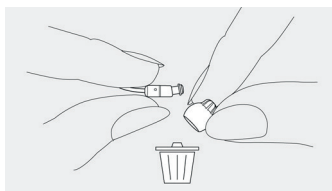

Byt ut EasyGuard™ var 3:e månad eller när den blir styv eller skör.

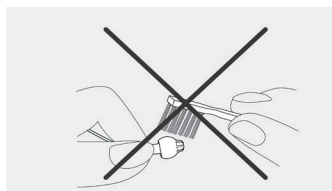

Använd inte vassa föremål eller en borste för rengöring eftersom det kan skada EasyGuard™.

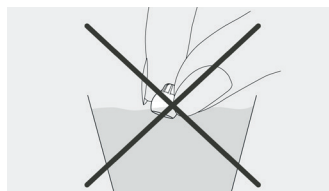

Lägg inte EasyGuard™ i vatten. Vatten som samlas i domen kan skada hörtelefonen.


Skanna
för video-
instruktion:





Cerustop filterbyte

Notera:


Byt filter på dina hörapparater vid behov. Ta bort det gamla och sätt i ett nytt vaxfilter med Cerustop-verktyget.

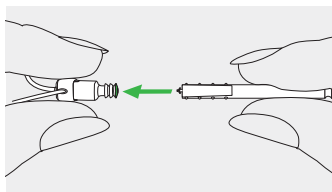

1. Ta bort domen från hörtelefonen. Sätt in borttagningsänden av verktyget i det använda vaxfiltret.

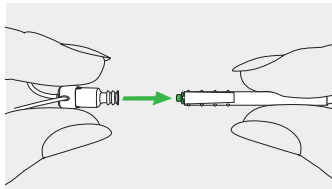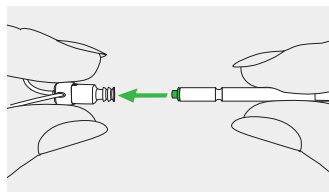

2. Dra försiktigt rakt ut, vrid inte, och avlägsna vaxfiltret från hörtelefonen.

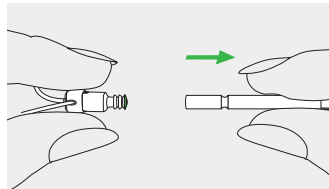

3. För att sätta i det nya vaxfiltret, tryck försiktigt in andra änden av verktyget rakt in i hålet på hörtelefonen tills det nya filtret är på plats.

4. Dra verktyget rakt ut. Det nya vaxfiltret kommer att sitta kvar. Sätt nu tillbaka domen på hörtelefonen.

Skanna
för video-
instruktion:



Starta om dina hörapparater

Notera:

Starta om dina hörapparater om de befinner sig i ett felläge. Omstart raderar inte något program eller inställningar.

1. Tryck på den nedre delen av multifunktionsknappen på hörapparaten tills indikatorljuset lyser rött.

2. Tryck igen på den nedre delen av multifunktionsknappen på hörapparaten tills indikatorljuset blinkar grönt. Hörapparaten har startat om när indikatorljuset lyser grönt.

Skanna
för video-
instruktion:

