



Onderhoudsinstructies

Luidspreker in het oor - batterijen - dome




Overzicht:

1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?
2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?
3. Hoe kan ik de filter vervangen van mijn hoortoestellen?
4. Hoe kan ik de batterijen van mijn hoortoestellen vervangen?

1. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen in- en uitdoen?


Kleurmarkering op je hoortoestellen

Elk hoortoestel is afzonderlijk geprogrammeerd voor je rechter- of linkeroor. Voor de eerste stap dien je je rechter en linker hoortoestel te identificeren, zodat je jouw hoortoestel(len) in het juiste oor plaatst. Op de meeste hoortoestellen vind je op het rechterhoortoestel een **rode markering** en op het linkerhoortoestel een **blauwe markering**.

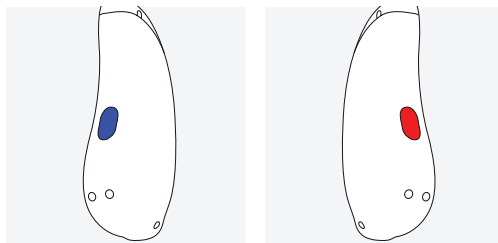


Hoe kan ik mijn hoortoestellen best indoen?

1. Kies het juiste hoortoestel
2. Het toestel met de **rode markering** hoort in je **rechteroor**, **blauw** is voor je **linkeroor**
3. Schuif het hoortoestel achter je oorschelp
4. Hou de bocht van de luidsprekerdraad tussen je duim en wijsvinger.
De luidspreker of dopje moet wijzen in de richting van de opening van je gehoorgang
5. Plaats de luidspreker nu voorzichtig in je gehoorgang
6. Duw met het topje van je wijsvinger de luidspreker voldoende diep in je gehoorgang
 - a. Optioneel: Als er een draadje aan het dopje zit, plaatst je deze in je oorschelp om het hoortoestel stevig te plaatsen
7. Het toestel zit goed wanneer het kabeltje van de luidspreker goed aansluit tegen de zijkant van je hoofd
8. Wanneer het hoortoestel goed zit en je het niet meer aanraakt, mag het niet meer fluiten

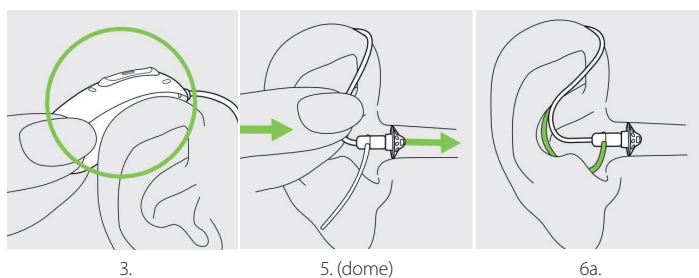

Hoe kan ik mijn hoortoestellen best uitdoen?

1. Neem het hoortoestel vast bij het slangetje en neem het voorzichtig uit je oor
2. Trek zachtjes met je vrije hand je oorlel naar beneden

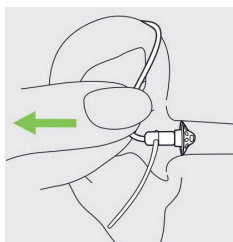

2. Hoe kan ik het best mijn hoortoestellen onderhouden?

Je hoortoestellen en dopjes komen tijdens het dragen in contact met transpiratie, huidvetten en oorsmeer. Dat is perfect normaal. Door je hoortoestellen en het dopjes goed schoon te houden, voorkom je irritatie, jeuk en andere problemen in je gehoorgang en oorschelp. Wanneer je jouw hoortoestellen goed onderhoudt, heb je er ook langer plezier van.

Wat heb je nodig voor het onderhoud van je hoortoestellen?

- Reinigingsdoekjes of reinigingsspray
- Filters (Cerushield Disk)
- Dopjes/domes
- Droogtabletten of droogbox

Een degelijke en regelmatige verzorging van je hoortoestellen zal bijdragen aan uitstekende prestaties tijdens de verwachte levensduur van je apparaten.

Algemene informatie

Voordat je haarlak of make-up gebruikt, dien je het hoortoestel uit je oor te halen, aangezien deze producten het toestel kunnen beschadigen. Je hoortoestellen zijn bestand tegen water, zweet en stof onder de volgende voorwaarden:

- Na blootstelling aan water, zweet of stof moet je de hoortoestellen schoonmaken en daarna drogen.
- De hoortoestellen worden gebruikt en onderhouden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Dagelijks onderhoud

Hoortoestellen

Inspecteer het dopje en de luidspreker op oorsmeer en vochtafzettingen en reinig de oppervlakken met een pluisvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van je hoortoestellen. Het wordt niet aangeraden het hoortoestel met water af te spoelen. Indien je de hoortoestellen grondig dient te reinigen, kan je advies en informatie vragen aan jouw audicien over filters of manieren van drogen. Leg je hoortoestellen dagelijks in de daarvoor voorziene droogbox of droogdoos met droogtablet.

Wekelijks onderhoud

Hoortoestellen

Reinig het dopje met een zacht doekje en reinigingsspray of met een speciale reinigingsdoek voor hoortoestellen.

Maandelijks onderhoud


Vervang de filter en het dopje elke maand tijdens de reiniging.

3. Hoe kan ik de filter en dome vervangen van mijn hoortoestellen?


Hoe moet ik mijn dome (zacht dopje) en filter vervangen?

Je hoortoestellen zijn uitgerust met een cerumenfilter om de luidspreker te beschermen tegen schade door oorsmeer. Controleer de cerumenfilter regelmatig en vervang deze als hij er vies uit ziet of als het volume of de geluidskwaliteit van je hoortoestellen achteruit gaan. De cerumenfilter dient iedere vier weken te worden vervangen op een normale luidspreker en iedere week tot twee weken op een ActiveVent™ Receiver.


De dome (zacht dopje) van de luidspreker verwijderen

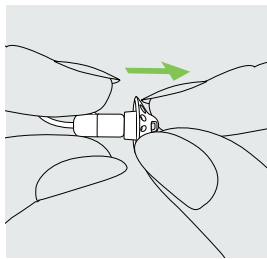

1. Verwijder de dome (zacht dopje) van de luidspreker door de luidspreker in de ene hand te houden en de dome (zacht dopje) in de andere.

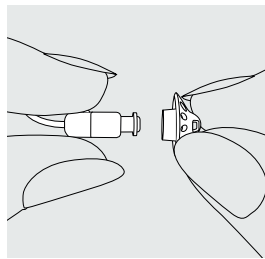


2. Trek zachtjes aan de dome (zacht dopje) om deze te verwijderen.

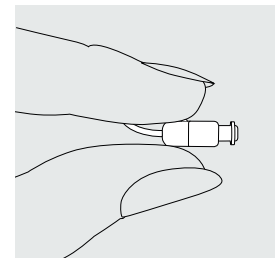


3. Reinig de luidspreker met een pluisvrije doek

De cerumenfilter vervangen met CeruShield™ Disk

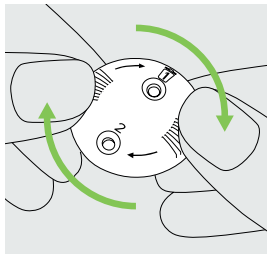

1. Draai de CeruShield Disk voorzichtig in de richting die met de pijlen wordt aangegeven totdat er een vrije ruimte onder het prullenbak-pictogram verschijnt.

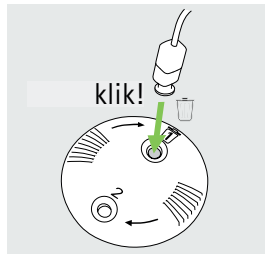


2. Om een gebruikte cerumenfilter te vervangen, plaatst je de luidspreker in de vrije ruimte (onder het prullenbak-pictogram) tot deze vastklikt. De gebruikte cerumenfilter blijft in de disk wanneer je de luidspreker opheft.




3. Om een nieuwe cerumenfilter in te voeren, plaats je de luidspreker voorzichtig in de opening waar de nieuwe cerumenfilter zichtbaar is (tegenover het prullenbak-pictogram) tot deze vastklikt. Til de luidspreker op van de disk. De nieuwe cerumenfilter bevindt zich nu in de luidspreker.


De dome (zacht dopje) op de speaker plaatsen

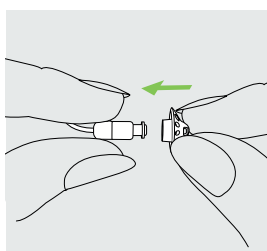

1. Hou de luidspreker in de ene hand en de dome (zacht dopje) in de andere.

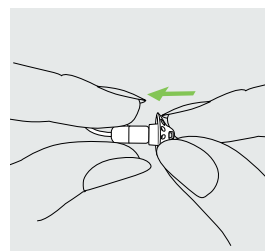

2. Schuif de dome (zacht dopje) over de geluidsuitgang van de luidspreker

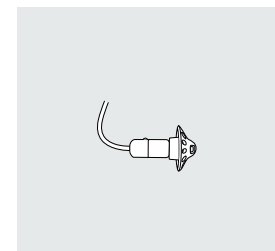

3. De luidspreker en de dome (zacht dopje) zouden perfect in elkaar moeten passen.

4. Hoe kan ik de batterijen van mijn hoortoestellen vervangen?

Wanneer de batterijen van je hoortoestellen bijna leeg zijn, krijg je twee piepjes te horen. Je hebt dan nog ongeveer 30 minuten om de batterij te vervangen (dit kan verschillen, afhankelijk van de instellingen van het hoortoestel en de batterij). Wij raden aan om altijd een nieuwe batterij bij de hand te hebben.

1. Haal de sticker van de nieuwe batterij en wacht twee minuten.
2. Open de batterijlade.
3. Plaats de batterij in de batterijlade met het "+"-symbool naar boven gericht.

Indien het sluiten van de batterijlade moeizaam gaat: controleer of de batterij juist is geplaatst en of het "+"-symbool naar boven wijst. Indien de batterij verkeerd geplaatst is, zal het hoortoestel niet werken en kan de batterijlade beschadigd raken.