

# **AVVERTENZE e INFORMAZIONI DI SICUREZZA**

Per i preservativi in **Poliisoprene Durex**

## **UNA NOTA SUI PRESERVATIVI IN POLIISOPRENE E LE ALLERGIE AL LATTICE**

Questo è un materiale senza lattice quindi i preservativi in Poliisoprene sono adatti per le persone allergiche alle proteine del lattice di gomma naturale. I nostri test dimostrano che i preservativi in Poliisoprene Durex hanno un potenziale minimo di ipersensibilità ritardata indotta (definita anche come “reazione allergica di tipo IV”, ovvero “dermatite da contatto”). Tuttavia, alcune persone sensibili al lattice potrebbero comunque mostrare sensibilità anche verso questi preservativi. In caso di irritazione o reazione allergica, interrompere l'uso di questi preservativi e consultare un medico.

## **AVVERTENZE**

Utilizzare solo lubrificanti consigliati per l'uso combinato con i preservativi. I lubrificanti a base oleosa (derivati del petrolio, oli per bambini e ovuli vaginali) ed alcuni medicinali topici che vengono applicati sul pene o sulla vagina possono danneggiare il preservativo. **INTERROMPERE L'UTILIZZO:** se si avverte fastidio o irritazione durante l'utilizzo del preservativo. Il preservativo è monouso. Il riutilizzo può aumentare il rischio di infezioni o gravidanze indesiderate. I preservativi possono causare rischio di soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di sesso orale, durante i preliminari, utilizzare un nuovo preservativo per le fasi successive del rapporto. In caso di sesso anale applicare in aggiunta un lubrificante sulla parte esterna del preservativo (non utilizzare il gel lubrificante Durex Fresh). Ricorda che nessun metodo contraccettivo garantisce una protezione al 100% da gravidanze indesiderate, HIV o infezioni sessualmente trasmissibili.

## **PRIMA DELL'UTILIZZO**

Prima di usare il preservativo, controllare la data di scadenza riportata sull'involucro. Se l'involucro è visibilmente danneggiato, non utilizzare il preservativo e sostituirlo con uno proveniente da un involucro integro. Indossare il preservativo sul pene eretto, prima che lo stesso entri in contatto con il partner. Ciò aiuta ad evitare gravidanze indesiderate e la possibilità di contrarre infezioni sessualmente trasmissibili durante il sesso vaginale, anale o orale.

## **QUANDO CONSULTARE UN MEDICO O UN FARMACISTA**

Rivolgersi ad un medico o ad un farmacista in caso di possibile allergia al lattice, irritazione o fastidio persistente dopo l'uso o se si utilizzano medicinali topici sul pene o sulla vagina. In caso di perdite o rottura del preservativo durante l'uso o sensazione di bruciore durante il rapporto, consultare un medico o un farmacista il prima possibile ed entro 72 ore. Incidenti

gravi devono essere riportati a Reckitt e alle autorità locali competenti, le quali provvederanno a fornire ulteriori istruzioni.