

# **AVVERTENZE e INFORMAZIONI DI SICUREZZA**

Per i preservativi in **Nitrile Durex**

## **UNA NOTA SU NUDE SENSATION E LE ALLERGIE AL LATTICE**

Il nitrile è un materiale senza lattice di gomma naturale, quindi è ideale per persone che hanno un'allergia alle proteine del lattice di gomma naturale. Tuttavia, alcuni individui altamente sensibili potrebbero manifestare reazioni allergiche agli ingredienti di questi preservativi. Se tu o il tuo partner sperimentate sensazioni di prurito, irritazione, secrezione, eruzione cutanea, dolore, gonfiore e/o sensazione di bruciore, che causano in una certa misura un'infezione della vagina o del pene, interrompete l'utilizzo e consultate il vostro medico. Ricorda che nessun metodo contraccettivo garantisce una protezione al 100% da gravidanze indesiderate, HIV o infezioni sessualmente trasmissibili. Se sospetti che tu o il tuo partner possiate essere incinta o infetti, consulta immediatamente il tuo medico. I preservativi possono presentare rischio di soffocamento.

## **AVVERTENZE**

Utilizzare solo lubrificanti a base siliconica o oleosa. **NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTI A BASE ACQUOSA**, poichè questi potrebbero danneggiare il preservativo e di conseguenza impedire al prodotto di adempiere al suo scopo. **ATTENZIONE:** Alcuni medicinali topici che vengono applicati sul pene o sulla vagina possono danneggiare il preservativo; in questi casi, consulta il tuo medico prima di utilizzare il preservativo. **INTERROMPERE L'UTILIZZO:** se si avverte fastidio o irritazione durante l'utilizzo del preservativo. Il preservativo è monouso. Il riutilizzo può aumentare il rischio di infezioni o gravidanze indesiderate. I preservativi possono causare rischio di soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## **PRIMA DELL'UTILIZZO**

Prima di usare il preservativo, controllare la data di scadenza riportata sull'involucro. Se il preservativo è appiccicoso o si sgretola, non utilizzarlo. Se l'involucro è visibilmente danneggiato, non utilizzare il preservativo e sostituirlo con uno proveniente da un involucro integro. Indossare il preservativo sul pene eretto prima che lo stesso entri in contatto con il partner. Ciò aiuta ad evitare gravidanze indesiderate e la possibilità di contrarre infezioni sessualmente trasmissibili durante il sesso vaginale, anale o orale.

## **QUANDO CONSULTARE UN MEDICO O UN FARMACISTA**

Rivolgersi ad un medico o ad un farmacista in caso di possibile allergia al lattice, irritazione o fastidio persistente dopo l'uso o se si utilizzano medicinali topici sul pene o sulla vagina. In caso di perdite o rottura del preservativo durante l'uso o sensazione di bruciore durante il rapporto, consultare un medico o un farmacista il prima possibile ed entro 72 ore. Incidenti

gravi devono essere riportati a Reckitt e alle autorità locali competenti, le quali provvederanno a fornire ulteriori istruzioni.