

AVVERTENZE e INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per i preservativi Durex Retard

AVVERTENZE

Ad alcune persone il lubrificante Performa™ contenuto in questi preservativi può causare eruzioni cutanee, irritazioni, bruciore o prurito. Evitare il contatto con gli occhi. Dopo l'uso, rimuovere ogni traccia di lubrificante. In caso di irritazione, interrompere l'utilizzo di i Durex Retard. Se il problema persiste, consultare un medico. Non usare questi preservativi se tu o il tuo partner avete la pelle lesa o infiammata. L'eiaculazione precoce è un problema comune, che può avere diverse cause e potrebbe richiedere un controllo medico. Se tale condizione dovesse persistere anche con l'uso di questi preservativi, è utile rivolgersi ad un medico.

Questo preservativo è realizzato in lattice di gomma naturale, che può causare reazioni allergiche fra cui shock anafilattico nel caso in cui l'utilizzatore sia allergico al lattice. **INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO E CONTATTARE UN MEDICO:** se tu o il tuo partner avvertite difficoltà respiratorie o se le vostre labbra assumono una colorazione blu durante l'uso di questi preservativi. Il preservativo è monouso. Il riutilizzo può aumentare il rischio di infezioni o gravidanze indesiderate. In caso di sesso orale in fase preliminare, utilizzare un nuovo preservativo per le fasi successive del rapporto. Utilizzare solo lubrificanti consigliati per l'uso combinato con i preservativi. I lubrificanti a base oleosa (derivati del petrolio, olii per bambini e ovuli vaginali) ed alcuni prodotti topici che vengono applicati sul pene o sulla vagina possono danneggiare il preservativo. In caso di sesso anale applicare in aggiunta un lubrificante sulla parte esterna del preservativo (non usare Durex Fresh o Lovers Connect). Ricorda che nessun metodo contraccettivo garantisce una protezione al 100% da gravidanze indesiderate, HIV o infezioni sessualmente trasmissibili. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PRIMA DELL'UTILIZZO

Prima di usare il preservativo, controllare la data di scadenza riportata sull'involucro. Se l'involucro è visibilmente danneggiato, non utilizzare il preservativo e sostituirlo con uno proveniente da un involucro integro. Indossare il preservativo sul pene eretto, prima che lo stesso entri in contatto con il partner. Ciò aiuta ad evitare gravidanze indesiderate e la possibilità di contrarre infezioni sessualmente trasmissibili.

QUANDO CONSULTARE UN MEDICO O UN FARMACISTA

Rivolgersi ad un medico o ad un farmacista in caso di possibile allergia al lattice o irritazione/fastidio persistenti dopo l'uso o se si utilizzano medicinali topici sul pene o sulla vagina. In caso di perdite o rottura del preservativo durante l'uso o sensazione di bruciore durante il rapporto, consultare un medico o un farmacista il prima possibile ed entro 72 ore.