

Den tiltenkte bruken av dette produktet er til prevensjon og til å forebygge overføring av seksuelt overførbare sykdommer. Husk at det ikke finnes noen prevensjonsmidler som gir 100% beskyttelse mot uønsket graviditet, hiv eller seksuelt overførbare infeksjoner.

Performa™ silikonbasert glidemiddel inneholder 5 % benzokain, et lokalt bedøvelsesmiddel som får ham til å vare lenger. Inneholder et legemiddel.

FØR DU SETTER I GANG

Sjekk alltid utløpsdatoen på folien før du bruker kondomet. Hvis pakningen er tydelig skadet, kast kondomet og bruk et nytt fra en uskadet pakning. Sett på kondomet før penis berører den andre personen. Dette hjelper med å hindre uønsket graviditet og risiko for seksuelt overførbare infeksjoner under vaginal-, anal- eller oralsex. Hvis du er gravid eller ammer må du snakke med lege før bruk.

SLIK BRUKER DU KONDOMET

1. Riv opp pakningen fra den taggete kanten. Vær forsiktig med kondomet, det kan bli skadet av negler eller skarpe gjenstander.
2. Med rullen vendt utover klemmer du på hetten og setter på kondomet øverst på den erigerte penis.
3. Rull kondomet helt ned til basen av penis. Hvis kondomet ikke lar seg rulle ut, kan det være satt på feil vei. Kast det og bruk et nytt. Stopp og sjekk om kondomet glir av eller sitter for stramt på penis, da det kan føre til at det sprekker. Ta av kondomet kort tid etter ejakulering. Hold kondomet fast ved basen av penis før du trekker det av.

4. Kast folien og det brukte kondomet i

en søppelbøtte. Ikke skyll det ned i toalettet.

KONTRAINDIKASJONER

Dette kondomet er laget av naturgummilateks og inneholder benzokain. Hvis du har en kjent allergi mot lateks eller benzokain, må du ikke bruke dette kondomet siden det kan forårsake allergiske reaksjoner, deriblant anafylaktisk sjokk.

ADVARSLER

SLUTT Å BRUKE KONDOMET: Hvis du føler ubehag eller irritasjon mens du bruker kondomet. Bare bruk kondomet én gang. Gjenbruk kan øke risikoen for svikt/infeksjon. Kondomer kan utgjøre en kvelningsfare. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis du bruker kondomet til oralsex først, bør du bruke et nytt kondom til enhver annen form for sex som følger.

Bruk bare glidemidler som anbefales for bruk med kondomer. Oljebaserte produkter (vaselin, babyolje og noen pessarer) samt enkelte topiske legemidler som påføres penis eller vagina kan skade kondomer. Ved analsex bør du bruke ekstra glidemiddel (ikke bruk Durex Tingle eller Embrace) på utsiden av kondomet. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker på om du er allergisk mot lateks, hvis irritasjon eller ubehag vedvarer etter bruk, eller hvis du bruker lokale legemidler på penis eller i vagina. Hvis et kondom lekker eller sprekker under sex, bør du rådføre deg med lege eller apotek så snart som mulig og innen 72 timer. For tidlig utløsning er et vanlig problem. Det kan ha mange årsaker og kan kreve at du oppsøker lege. Hvis disse kondomene ikke hjelper, bør du oppsøke lege.

Hos noen kan Performa™-glidemiddelet på disse kondomene gi utslett, irritasjon, svie eller kløe. Unngå kontakt med øynene, og vask det av etter bruk. Opplever du irritasjon, skal du slutte å bruke Mutual Climax. Oppsøk lege hvis du ikke blir bedre. Ikke bruk disse kondomene hvis du eller partneren din har betent eller sprukket hud. **AVSLUTT BRUKEN OMGÅENDE, OG KONTAKT LEGE:** Hvis du eller partneren din opplever pustevansker eller blir blå på leppene under bruk av disse kondomene.

Alvorlige hendelser må meldes til Reckitt og den lokale kompetente myndigheten, som vil gi ytterligere råd.

Kondomet sprekker: Det er omtrent 2 % av alle latekskondomer som sprekker. Denne statistikken korrelerer imidlertid ikke direkte med graviditetsraten.

Når kondomer brukes riktig og konsekvent, forhindrer de graviditet svært effektivt.

Beskyttelse mot kjønns sykdommer: Latekskondomer reduserer risikoen for overføring av kjønns sykdommer ved å danne en barriere mot smitekilden.

Latekskondomer er mest effektive mot kjønns sykdommer som spres via kontakt med penishodet, for eksempel hiv.

Latekskondomer er mindre effektive mot kjønns sykdommer som spres ved kontakt via infisert hud som ikke er dekket av kondom, for eksempel herpes.

Kontakt helsepersonell hvis du tror du har en kjønns sykdom.

+47 67115930

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Rev 04 (06/2024)