

Den här produkten är avsedd att användas som preventivmedel och för att förhindra överföring av sexuellt överförbara sjukdomar. Kom ihåg att det inte finns något preventivmedel som ger ett 100 % säkert skydd mot graviditet eller HIV samt andra sexuellt överförbara infektioner.

Performa™ glidmedel innehåller 5 % benzokain, ett lokalbedövningsmedel som hjälper honom hålla ut längre. Innehåller en läkemedelssubstans.

Innan du sätter igång

Innan du använder detta kondom, kontrollera utgångsdatumet på omslaget. Om det enskilda kondomomslaget är tydligt skadat, kasta det och ta en ny från ett oskadat omslag. Trä på kondomen innan penis berör den andra personen. Detta hjälper till att förhindra graviditet och risken för att smittas av sexuellt överförbara infektioner under vaginalt, anal- eller oralsex. Prata med läkare innan du använder produkten ifall du är gravid eller ammar.

Så här använder du kondomen

Riv upp omslaget från den sågtandade kanten. Var försiktig med kondomen, den kan skadas av naglar eller vassa föremål.

Med rullen utåt, fatta tag om behållaren och sätt kondomen på toppen av den erigerade penis.

Rulla ner kondomen till penisroten. Om kondomen inte kan rullas ner kan den vara på fel håll. Släng den och använd en ny. Stoppa och kontrollera om kondomen glider av eller sitter för hårt på penis, eftersom det kan leda till att den går sönder. Ta av kondomen kort efter utlösning. Håll kondomen stadigt vid penisroten innan du drar ut den.

Kasta folien och det använda kondomet i en papperskorg. Spola inte ner det i toaletten.

#### KONTRAINDIKATIONER

Den här kondomen är tillverkad av naturligt latexgummi och innehåller bensokain. Om du vet om att du är allergisk mot latex eller bensokain ska du inte använda den här kondomen, eftersom det kan leda till allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock.

#### VARNINGAR

**SLUTA ANVÄNDA KONDOMEN:** Om du känner obehag eller irritation medan du använder kondomen. Kondomen får endast användas en gång. Återanvändning kan öka risken för att den inte fungerar eller för infektion. Kondomer kan medföra kvävningrisk. Förvaras utom räckhåll för barn. Om du använder kondomen för oralsex först, ska du ta en ny kondom för varje annan typ av sex som följer.

Använd endast glidmedel som rekommenderas för användning med kondom. Oljebaserade produkter (vaselin, babyolja och vissa pessar) samt vissa läkemedel för lokalt bruk som appliceras på penis eller i slidan kan skada kondomer. Använd extra glidmedel (använd inte Durex Tingle eller Embrace) på kondomens utsida vid analsex. Prata med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om du är allergisk mot latex, om irritation eller obehag kvarstår efter användning, eller om du använder läkemedel för lokal behandling på penis eller i slidan. Om en kondom läcker eller går sönder under sex ska du rådgöra med apotekspersonal eller läkare så snart som möjligt och inom 72 timmar. Tidig utlösning (prematur ejakulation) är ett vanligt förekommande problem. Det kan ha många olika orsaker och kan kräva medicinsk rådgivning. Om kondomerna inte hjälper rekommenderar vi att du talar med läkare.

Glidmedlet Performa™ som de här kondomerna behandlats med kan orsaka utslag, irritation, en brännande känsla eller klåda. Undvik att få medlet i ögonen och tvätta bort det efter användning. Om du upplever irritation ska du sluta använda Mutual Climax. Kontakta läkare om besvären inte går över. Använd inte de här kondomerna om du eller din partner har inflammerad hud eller sår. **SLUTA GENAST ANVÄNDA KONDOMERNA OCH TILLKALLA LÄKARE:** Om du eller din partner får andningssvårigheter eller blå läppar när ni använder kondomerna.

Allvarliga incidenter måste rapporteras till Reckitt och den lokala behöriga myndigheten, som kommer att ge ytterligare vägledning.

Fel på kondomen: Den kliniska felfrekvensen för latexkondomer är cirka 2 %, men denna siffra står inte i direkt förhållande till graviditetsfrekvensen.

När kondomer används korrekt och konsekvent är de mycket effektiva när det gäller att förhindra graviditet.

Skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar: Latexkondomer minskar risken för överföring av sexuellt överförbara infektioner genom att utgöra ett skyddande skikt gentemot infektkällan.

Latexkondomer är mest effektiva mot sexuellt överförbara sjukdomar som sprids via kontakt med ollonet, till exempel HIV.

Latexkondomer är mindre effektiva mot sexuellt överförbara sjukdomar som sprids genom kontakt med infekterad hud som inte täcks av en kondom, till exempel herpes.

Om du tror att du har en sexuellt överförbar sjukdom ska du kontakta läkare.

+46 8200070

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Rev 04 (06/2024)