




durex® SETTEBELLO FIT FINDER

MISURALO E SCOPRI LA VESTIBILITÀ PIÙ ADATTA A TE


Per prima cosa, stampa il seguente foglio con lo zoom **al 100%** (a colori o in bianco e nero). Per essere sicuri di aver stampato il Settebello **Fit Finder** con lo zoom al 100%, poni una tessera (come una carta d'identità elettronica o di pagamento) nel box sulla destra. Se la tessera combacia a pieno, è tutto pronto per **trovare la vestibilità più adatta a te.**

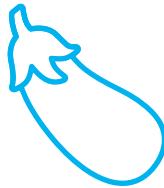

1

PREPARATI

Ritaglia il Settebello Fit Finder lungo la linea tratteggiata. Rilassati e assicurati di avere il pene completamente eretto.

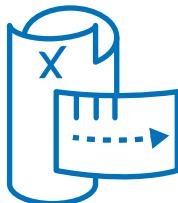

2

MISURALO AD EREZIONE COMPLETA

Avvolgi l'estremità più lunga del Settebello **Fit Finder** intorno alla parte centrale del pene eretto. Fai passare la linguetta del Settebello Fit Finder attraverso la fessura e tira fino in fondo. La **X** indicherà la vestibilità più adatta a te.

Fare attenzione ai bordi taglienti della carta!



3

SCOPRI LA VESTIBILITÀ PIÙ ADATTA A TE

Prendi nota della tua vestibilità che può essere:
ADERENTE, REGULAR, AMPIA, EXTRA E ULTRA

Ricordati: il risultato del Settebello Fit Finder è solo un riferimento. Se il risultato dovesse essere in contrasto con la vestibilità per te più confortevole, ti consigliamo di non considerare il risultato.

Posiziona qui una tessera (come una carta d'identità elettronica o di pagamento). Solo se combacia a pieno, è tutto pronto per trovare la vestibilità più adatta a te.



Scannerizza il QR code
e acquista il prodotto con
la vestibilità più adatta a te



durex® | SETTEBELLO
FIT FINDER

