

# **AVVERTENZE e INFORMAZIONI DI SICUREZZA**

Per i preservativi **Durex Love Collection**

## **AVVERTENZE**

Nessun metodo contraccettivo può garantire una protezione al 100% da gravidanze indesiderate o infezioni sessualmente trasmissibili.

## **UTILIZZO DEI PRESERVATIVI DUREX**

Indossare il preservativo sul pene eretto, prima che lo stesso entri in contatto con il partner. Ciò aiuta ad evitare gravidanze indesiderate e la possibilità di contrarre infezioni sessualmente trasmissibili. Controllare la data di scadenza riportata sull'involucro del preservativo prima dell'uso. Se l'involucro è visibilmente danneggiato, non utilizzare il preservativo e sostituirlo con uno proveniente da un involucro integro.

## **CONSIGLI D'USO**

Utilizzare solo lubrificanti consigliati per l'uso combinato con i preservativi. I lubrificanti a base oleosa (derivati del petrolio, olii per bambini e ovuli vaginali) ed alcuni prodotti topici che vengono applicati sul pene o sulla vagina possono danneggiare il preservativo. **INTERROMPERE** l'utilizzo nel caso in cui: si avverta fastidio o irritazione durante l'utilizzo del preservativo. Questi preservativi sono realizzati in lattice di gomma naturale, che può causare reazioni allergiche fra cui shock anafilattico nel caso in cui l'utilizzatore sia allergico al lattice. In caso di sesso anale, applicare del lubrificante (non utilizzare i Gel Durex Play Fresh o Durex Lovers Connect) nella parte esterna del preservativo. In caso di sesso orale in fase preliminare, utilizzare un nuovo preservativo per le fasi successive del rapporto. Il preservativo è monouso. Il riutilizzo può aumentare il rischio di infezioni o gravidanze indesiderate.

## **CONSULTARE UN MEDICO O UN FARMACISTA**

Se si utilizzano prodotti topici sul pene o sulla vagina; in caso di irritazione/fastidio persistenti dopo l'uso; possibile allergia al lattice; perdite dal preservativo o rottura durante l'uso (da fare appena possibile ed entro 72 ore).