



Účelem použití tohoto zdravotnického prostředku je antikoncepce a prevence přenosu pohlavně přenosných chorob. Pamatujte, že žádná metoda antikoncepce nefunguje 100% proti otěhotnění, HIV nebo pohlavně přenosným chorobám.

Lubrikant Performa™ obsahuje 5% benzokain, lokální anestetikum, které pomáhá mužům oddálit vyvrcholení. Obsahuje léčivou látku.

PŘED POUŽITÍM

Před použitím kondomu zkontrolujte datum jeho použitelnosti na obale. Je-li obal kondomu zjevně porušený, kondom zlikvidujte a použijte jiný z nepoškozeného obalu. Nasadte si kondom, než se penis dotkne druhé osoby. Pomáhá to zabránit těhotenství a možnosti nákazy sexuálně přenosnými infekcemi během vaginálního, análního nebo orálního sexu.

Pokud jste těhotná nebo kojíte - poraďte se před použitím s lékařem.

POUŽITÍ KONDOMU

Otevřete fólii odtržením obalu od zoubkované hrany. Zacházejte s kondomem opatrně, protože byste jej mohli poškodit nehty nebo ostrými předměty.

Se srolovanou částí zvenku stiskněte rezervoár a nasadte kondom na vrchol ztopořeného penisu.

Srolujte dolů směrem ke kořenu. Pokud se kondom nesroluje, může být naruby; vyhodte jej a použijte nový. Přestaňte a zkontrolujte, zda nepociťujete, že kondom sklouzává nebo svírá penis příliš těsně, protože by to mohlo vést k prasknutí. Těsně po ejakulaci je třeba kondom sejmout. Kondom před vytáhnutím penisu pevně přidržujte u kořene penisu.

Fólii a použitý kondom vyhodte do koše. Nesplachujte do toalety.

KONTRAINDIKACE

Tyto kondomy jsou vyrobeny z přírodního kaučukového latexu, který může vyvolat

alergickou reakci včetně anafylaktického šoku, pokud je uživatel alergický na latex.

UPOZORNĚNÍ

PŘESTAŇTE JEJ POUŽÍVAT, pokud: pociťujete nepohodlí nebo podráždění při používání kondomu. Kondom je pouze na jedno použití. Opětovné použití může zvýšit riziko selhání nebo infekce. Kondomy mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Jestliže použijete kondom nejprve k orálnímu sexu, použijte nový kondom pro jakýkoli další typ sexu, který následuje.

Používejte pouze lubrikanty doporučené pro používání s kondomy. Lubrikanty na bázi oleje (vazelína, dětský olej nebo některé lubrikanty na pesar) a některé léky k vnějšímu použití aplikované na penis nebo do vaginy mohou kondomy poškodit. Při análním sexu použijte další lubrikaci (nepoužívejte Durex Tingle nebo Embrace) na vnější stranu kondomu. Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže si nejste jistí, zda máte alergii na latex nebo po použití přetrvává podráždění či nepříjemný pocit nebo používáte léky k vnějšímu použití aplikované na penis nebo do vaginy. Jestliže kondom při použití prosakuje nebo praskne, poradte se se svým lékárníkem nebo lékařem co nejdříve do 72 hodin. Předčasná ejakulace je častý problém, který může mít mnoho příčin a může vyžadovat lékařskou konzultaci. Pokud tyto kondomy nepomáhají, poradte se se svým lékařem.

Lubrikant Performa™ na kondomech Durex Performa může některým lidem způsobovat vyrážku, podráždění, pálení nebo svědění. Zabraňte vniknutí do očí a po použití jej smyjte. Pokud pociťte podráždění, přestaňte kondomy Durex Performa používat. Pokud se nedostaví zlepšení, navštivte svého lékaře. Nepoužívejte tyto kondomy, pokud máte vy nebo vaše partnerka/váš partner zanícenou nebo porušenou kůži. **OKAMŽITĚ JE PŘESTAŇTE POUŽÍVAT A ZATELEFONUJTE LÉKAŘI**, pokud: vy nebo vaše partnerka/váš partner pociťte dýchací potíže nebo vám po používání těchto kondomů zmodrají rty. Nežádoucí příhody musí být nahlášeny společnosti Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který poskytne další rady.

Studie spolehlivosti kondomů: Klinická míra selhání latexových kondomů je přibližně 2 %; tato míra však přímo nesouvisí s pravděpodobností otěhotnění.

Kondomy jsou při správném a důsledném používání velmi účinným prostředkem k ochraně před otěhotněním.

Ochrana před pohlavně přenosnými chorobami: Latexové kondomy snižují riziko přenosu pohlavně přenosných chorob tím, že vytvářejí bariéru mezi zdrojem infekce a kůží.

Latexové kondomy jsou nejúčinnější proti pohlavně přenosným chorobám, které se šíří prostřednictvím kontaktu s hlavou penisu, jako například HIV.

Latexové kondomy jsou méně účinné proti pohlavně přenosným chorobám, které se šíří kontaktem přes infikovanou kůži, která není kryta kondomem, jako je například herpes.

Pokud se domníváte, že máte pohlavně přenosnou chorobu, kontaktujte svého lékaře.

Souhrn bezpečnosti a klinické účinnosti je k dispozici na vyžádání u našeho zákaznického servisu.

Výrobce: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Datum poslední revize návodu k použití: Rev 04 (06/2024).