

Tämä tuote on tarkoitettu ehkäisemään raskauden lisäksi sukupuoliteitse tarttuvia tauteja. Huomioithan, että mikään ehkäisymenetelmä

ei suojaa 100-prosenttisesti raskaudelta, HIV:ltä tai sukupuoliteitse tarttuvilta infektioilta.

Performa™-liukasteaine sisältää 5 % paikallispuudutusainetta (bentsokaiinia), joka auttaa miestä kestämään pidempään. Sisältää lääkeainetta

ENNEN KUIN ALOITAT

Tarkista ennen tämän kondomin käyttöä kondomin viimeinen käyttöpäivä. Jos yksittäispakkaus on selvästi vaurioitunut, hävitä se ja ota uusi ehjistä pakkauksesta. Laita kondomi paikalleen ennen kuin penis koskettaa toista henkilöä. Tämä auttaa ehkäisemään raskautta sekä sukupuolitaudin tarttumisen mahdollisuutta vaginaaliseksi, anaali- tai suuseksiä aikana. Jos olet raskaana tai imetät, keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen tuotteen käyttöä.

KUINKA KÄYTÄT KONDOMIA

1. Repäise kääre auki reunan lovesta. Ole varovainen kondomin kanssa, se voi vahingoittua kynsien tai terävien esineiden takia.
2. Pitele kondomia rullan ollessa ulkopuolella, purista säiliötä ja aseta kondomi erektiossa olevan peniksen päähän.
3. Rullaa kondomi alas peniksen tyveen asti. Jos kondomi ei rullaudu auki, se voi olla väärinpäin. Hävitä se ja ota uusi kondomi. Pysähdy ja tunnustele, liukuuko kondomi peniksen päältä tai tuntuuko se liian tiukalta, sillä se voi aiheuttaa rikkoutumisen. Ota kondomi pois pian siemensyöksyn jälkeen. Pidä kondomista tukevasti kiinni peniksen tyven kohdalta ennen kuin vedät sen pois.
4. Heitä foliopakkaus ja käytetty kondomi sekajäteastiaan. Älä huuhtelee sitä alas vessanpöntöstä.

VASTA-AIHEET

Tämä kondomi on valmistettu luonnonkumilateksista ja sisältää bentsokaiinia. Jos olet allerginen lateksille tai bentsokaiinille, älä käytä tätä kondomia. Se voi aiheuttaa allergisen reaktion, kuten anafylaktisen shokin.

VAROITUKSET

LOPETA KÄYTTÖ: Jos tunnet ärsytystä tai epämukavuutta kondomia käyttäessäsi. Käytä kondomia vain kerran. Uudelleen käyttäminen voi lisätä ehkäisyn epäonnistumisen tai infektion riskiä. Kondomit voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä poissa lasten

ulottuvilta. Jos käytät kondomia suuseksissä ensin, sinun tulee ottaa uusi kondomi kaikkea muuta seksiä varten.

Käytä vain sellaisia liukasteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kondomien kanssa. Öljypohjaiset valmisteet (vaseliini, vauvaöljy ja jotkin pessaarit) sekä penikseen tai emättimeen käytettävät lääkevalmisteet voivat vahingoittaa kondomia. Käytä anaaliseksiä lisäliukastetta (älä käytä Durex Tingle- tai Embrace-liukuvoidetta) kondomin ulkopuolella. Käänny lääkärin tai farmaseutin puoleen, jos olet epävarma, oletko allerginen lateksille, jos ärsytys tai epämukavuus jatkuu käytön jälkeen, tai jos käytät paikallisia lääkkeitä penikseen tai emättimeen. Jos kondomi vuotaa tai puhkeaa seksin aikana, kysy neuvoa lääkäriltä tai farmaseutilta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 72 tunnin kuluessa. Ennenaikainen siemensyöksy on yleinen ongelma, jolla voi olla monia syitä ja joka saattaa vaatia lääketieteellistä hoitoa. Jos näistä kondomeista ei ole apua, kannattaa käänntyä lääkärin puoleen.

Näiden kondomien sisältämä Performa™- liukasteluaine voi aiheuttaa ihottumaa, ärsytystä, kirvelyä tai kutinaa. Vältä liukasteaineen joutumista silmiin. Pese liukasteaine pois käytön jälkeen. Jos ärsytystä ilmenee, lopeta Mutual Climax -kondomin käyttö. Jos oireet eivät parannu, mene lääkäriin. Älä käytä näitä kondomeja, jos oma ihosi tai kumppanisi iho on tulehtunut tai rikkoutunut. **LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI JA OTA YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN:** Jos sinulla tai kumppanillasi ilmenee hengitysvaikeuksia tai huulet sinertyvät kondomien äytön aikana.

Vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava Reckittille ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka antaa tarvittavat lisäohjeet.

Rikkoutunut kondomi: Noin 2 % kaikista lateksikondomeista rikkoutuu. Tämä tilasto ei kuitenkaan korreloi suoraan raskauden todennäköisyyden kanssa.

Oikein ja johdonmukaisesti käytettynä kondomit ovat erittäin tehokkaita raskauden ehkäisyssä.

Suoja sukupuolitauteja vastaan: Lateksikondomit vähentävät sukupuolitautilien tartuntariskiä muodostamalla esteen tartunnan lähteelle.

Lateksikondomit ovat tehokkaimpia sellaisten sukupuolitautilien ehkäisyssä, jotka leviävät kosketuksessa peniksen päähän (esim. HIV).

Lateksikondomit eivät ole yhtä tehokkaita sellaisia sukupuolitauteja vastaan, jotka leviävät kosketuksessa infektoituneeseen ihoon, jota ei peitä kondomi (esim. herpes).

Jos epäilet, että sinulla on sukupuolitauti, ota yhteyttä terveydenhuoltoon.

FI: +358 290009200

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Rev 04 (06/2024)