

AVVERTENZE E INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per il sex toy **Durex Pleasure Ring**

AVVERTENZE

È importante essere informati. Leggere le informazioni all'interno della confezione. Fare attenzione se si utilizzano oggetti appuntiti e affilati per aprire la confezione in quanto si potrebbe danneggiare l'anello. Se la confezione è già danneggiata, non utilizzare l'anello. Non addormentarsi con il Pleasure Ring indossato in quanto l'uso prolungato può causare lesioni permanenti al pene. Non usare il Pleasure Ring sotto l'influenza di alcool o droghe, in quanto la loro assunzione potrebbe ridurre la capacità di giudizio ed aumentare il rischio di danni al pene. L'uso scorretto del Pleasure Ring può causare lividi, lesioni dolorose o danni permanenti al pene. Pleasure Ring non è un contraccettivo.

L'uso di Pleasure Ring potrebbe peggiorare condizioni mediche esistenti come:

- Malattia di Peyronie (indurimento anomalo del tessuto che riveste i corpi cavernosi del pene che causa dolore, curvatura e distorsione del pene, solitamente durante l'erezione);
- Priapismo (sindrome caratterizzata da erezione involontaria di lunga durata, solitamente dolorosa non accompagnata da eccitamento sessuale)
- Stenosi uretrale (restringimento dell'uretra con conseguente difficoltà ad urinare) • L'uso del dispositivo potrebbe causare la rottura dei vasi sanguigni all'interno del pene o dello scroto, risultando in lividi, emorragie o la formazione di ematomi.
- Diagnosi ritardata di altre condizioni: se presenti sintomi di disfunzione erettile consulta il tuo medico prima di usare questo dispositivo: così facendo si può evitare un ritardo, potenzialmente dannoso, nel diagnosticare una qualsiasi tra le cause più comuni di questa condizione, come diabete, sclerosi multipla, cirrosi epatica, insufficienza renale cronica o alcolismo.

Non usare il dispositivo se si ha una percezione del dolore compromessa a livello del pene, in quanto può influenzare la capacità nell'individuare possibili lesioni.

Non usare il dispositivo se la forza delle tue mani è ridotta in quanto ciò può rendere difficile la rimozione del dispositivo.

PRIMA DELL'UTILIZZO

Leggi attentamente queste istruzioni e conservale per i futuri utilizzi. I sex toys sono progettati per il divertimento e il piacere, se l'uso dell'anello non è confortevole, interrompere l'utilizzo

immediatamente. Consulta un medico se te e il tuo partner riscontrate complicazioni con l'anello. Interrompi l'utilizzo se i fastidi continuano con l'uso del dispositivo. Dovrebbe essere facile da indossare e da rimuovere.