



A utilização deste produto destina-se à contraceção e prevenção da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Lembra-te que nenhum método contraceutivo funciona a 100% contra a gravidez, o HIV ou as infeções sexualmente transmissíveis. O lubrificante de silicone Performa™ contém 5% de benzocaina, um anestético local para ajudá-lo a aguentar mais tempo. Contém uma substância medicinal.

### **ANTES DE COMEÇARES**

Antes de utilizares este preservativo, verifica a data de validade no invólucro do preservativo. Se o invólucro estiver claramente danificado, deita-o fora e usa um novo de uma embalagem não danificada. Coloca o preservativo antes que o pénis toque noutra pessoa. Isso ajuda a prevenir a gravidez e a possibilidade de contrair infeções sexualmente transmissíveis durante o sexo vaginal, anal ou oral. Se estás grávida ou a amamentar - consulta um profissional de saúde antes de utilizar.

### **COMO USAR O TEU PRESERVATIVO**

Abre o invólucro a partir da borda serrilhada. Tem cuidado com o preservativo, ele pode ser danificado por unhas ou objetos pontiagudos.

Com o rebordo do preservativo virado para fora, aperta a ponta e coloca o preservativo na ponta do pénis ereto.

Desenrola o preservativo até ao fim com a outra mão. Se o preservativo não se desenrolar, pode estar ao contrário, descarta-o e usa um novo. Pára e verifica se se solta ou se está demasiado apertado, já que isso pode provocar roturas. Deves retirar o preservativo logo após a ejaculação. Segura firmemente na base antes de o retirares.

Deita o preservativo usado e o seu invólucro no lixo. Não deites na sanita.

### **CONTRAINDICAÇÕES**

Este preservativo é feito de látex de borracha natural e contém benzocaina. Se és alérgico ao látex ou à benzocaina, não utilizes este preservativo já que pode causar reações alérgicas, incluindo choque anafilático.

### **PRECAUÇÕES**

**INTERROMPE A UTILIZAÇÃO:** Se sentires desconforto ou irritação ao utilizar o preservativo. Utiliza o preservativo apenas uma vez. A reutilização pode aumentar o risco de roturas ou infeções. Os preservativos podem representar um perigo de asfixia.

Manter fora do alcance das crianças. Se utilizares um preservativo para sexo oral primeiro, deves utilizar um novo preservativo para qualquer outro tipo de sexo que se siga

Usa apenas lubrificantes recomendados para uso com preservativos. Lubrificantes à base de óleo (vaselina, óleo de bebé e alguns pessários) e alguns medicamentos tópicos que se aplicam no pênis ou na vagina podem danificar os preservativos. Para sexo anal usa lubrificação adicional no exterior do preservativo (não utilizes Durex Frescor ou Lovers Connect). Consulta o teu médico ou farmacêutico se tiveres uma reação alérgica, se a irritação ou o desconforto persistirem após a utilização, ou se estás a utilizar medicamentos tópicos no pênis ou vagina. Se o preservativo se romper ou verter durante o sexo, consulta um farmacêutico ou médico o mais rápido possível e dentro de 72 horas. A ejaculação precoce é um problema comum, cujas causas podem requerer atenção médica. Se estes preservativos não o ajudarem, consulte o seu médico

Para algumas pessoas o lubrificante Performa™ dos preservativos Durex Prazer Prolongado pode causar erupções, irritação, ardor ou prurido. Evite o contato com os olhos. Limpa-te depois de utilizar. Se sentires irritação, interrompe a utilização e se não observares melhorias consulta um médico.

Não utilizes estes preservativos se tu ou o teu parceiro tiverem a pele inflamada ou gretada. Se tu ou o teu parceiro tiverem dificuldades respiratórias ou se os lábios ficarem azuis durante a utilização destes preservativos, **INTERROMPE IMEDIATAMENTE A UTILIZAÇÃO E CONSULTA UM MÉDICO.**

Incidentes graves devem ser reportados à Reckitt e à autoridade local competente que te proporcionará o melhor aconselhamento. Falha do preservativo: A taxa de falha clínica dos preservativos de látex é aproximadamente de 2%; contudo, esta percentagem não está diretamente correlacionada com a taxa de gravidez."

Quando se utilizam corretamente e consistentemente, os preservativos são muito eficazes para prevenir a gravidez.

Proteção contra as IST: os preservativos de látex reduzem o risco de transmissão de infeções sexualmente transmissíveis (IST) ao proporcionar uma barreira contra a fonte de infeção"

Os preservativos de látex são mais eficazes contra as IST que se transmitem por contacto com o pênis, como o HIV

Os preservativos de látex são menos eficazes contra as IST que se transmitem por contacto através da pele infetada que não está coberta pelo preservativo, como o herpes.

Se suspeitas ter uma IST, contacta um prestador de cuidados de saúde

Para obter um resumo de segurança e desempenho clínico, incluindo informação adicional sobre as taxas de gravidez e IST, consulta [durex.co.uk/pages/summary-of-safety-and-clinical-Performance](http://durex.co.uk/pages/summary-of-safety-and-clinical-Performance).

Fabricante: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS.

UK

Rev 04 (06/2024)