



Produkt ten jest przeznaczony do stosowania jako środek antykoncepcyjny oraz do zapobiegania przenoszeniu chorób przenoszonych drogą płciową.

Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową.

LUBRYKANT Performa™ zawiera benzokainę (5%), środek znieczulający miejscowo, pomagający przedłużyć stosunek. Zawiera substancję leczniczą.

PRZED UŻYCIEM

Przed użyciem sprawdź datę ważności na opakowaniu. Jeśli folijka, w której znajduje się prezerwatywa jest w widoczny sposób uszkodzona, należy ją wyrzucić i użyć nowej prezerwatywy z nieuszkodzonego opakowania. Prezerwatywę należy założyć, zanim dojdzie do kontaktu członka z drugą osobą. Takie postępowanie pomaga zapobiec ciąży i możliwości zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową podczas seksu waginalnego, analnego lub oralnego. Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią - skonsultuj się ze specjalistą przed użyciem.

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Rozewnij folijkę od ząbkowanej krawędzi. Obchodź się ostrożnie z prezerwatywą, gdyż może zostać uszkodzona paznokciami lub ostrymi przedmiotami.

Upewnij się, że zrolowana krawędź jest po zewnętrznej stronie. Ściśnij końcówkę i umieść prezerwatywę na czubku członka w stanie wzwodu.

Rozwiń prezerwatywę na całej długości członka. Jeśli prezerwatywa się nie rozwija, może być założona odwrotnie, wyrzucić ją i użyć nowej. Zatrzymaj się i sprawdź, czy prezerwatywa nie ześlizguje się lub nie przylega zbyt ściśle do członka, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Należy zdjąć prezerwatywę zaraz po wytrysku.

Mocno przytrzymaj prezerwatywę u podstawy członka przed jego wyciągnięciem.

Wyrzucić folię i użytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj jej do toalety.

PRZECIWSKAZANIA

Prezerwatywa jest wykonana z naturalnego lateksu i zawiera benzokainę. Jeśli masz alergię na lateks lub benzokainę, nie używaj tej prezerwatywy, ponieważ może to spowodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny.

KILKA OSTRZEŻEŃ

ZAPRZESTAŃ UŻYWANIA: Jeśli odczuwasz dyskomfort lub podrażnienie podczas używania prezerwatywy. Używaj prezerwatywy tylko raz. Ponowne użycie może zwiększać ryzyko uszkodzenia prezerwatywy i wystąpienia infekcji. Prezerwatywy mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli najpierw używasz prezerwatywy do seksu oralnego, należy użyć nowej prezerwatywy do każdego innego rodzaju seksu.

Używaj tylko żeli intymnych zalecanych do używania z prezerwatywami. Te na bazie oleju (wazelina, oliwka dla niemowląt i niektóre pesaria) oraz niektóre leki miejscowe stosowane w okolicy członka lub pochwy mogą uszkodzić prezerwatywę. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy (nie stosuj żelu intymnego Durex Stymulujący lub żelu intymnego Durex Rozgrzewający). Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą, jeśli nie masz pewności, czy jesteś uczulony(a) na lateks, jeśli podrażnienie lub dyskomfort utrzymują się po użyciu lub jeśli stosowane są miejscowe leki w okolicy członka lub pochwy. Jeśli prezerwatywa pęknie lub przecieknie podczas stosunku, należy jak najszybciej, w ciągu 72 godzin, skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem. Przedwczesny wytrysk to powszechny problem, który może mieć wiele przyczyn i może wymagać konsultacji lub opieki medycznej. Jeśli te prezerwatywy nie pomagają, warto skonsultować się z lekarzem.

U niektórych osób, lubrykant Performa™ znajdujący się na tych prezerwatywach może powodować wysypkę, podrażnienie, pieczenie lub swędzenie. Unikaj kontaktu z oczami i zmyj po użyciu. Jeśli wystąpi podrażnienie, zaprzestań używania prezerwatyw. Jeśli nie nastąpi poprawa, skonsultuj się z lekarzem. Nie używaj, jeśli u Ciebie lub partnera(ki) występuje stan zapalny lub uszkodzenie skóry. **NATYCHMIAST PRZESTAŃ UŻYWAĆ I**

WEZWIJ LEKARZA: jeśli w trakcie używania wystąpią trudności w oddychaniu lub zasinienie ust.

Poważne incydenty medyczne należy zgłaszać firmie Reckitt i lokalnym właściwym władzom, które udzielą dalszych porad.

Nieskuteczność prezerwatyw: Kliniczny wskaźnik zawadności prezerwatyw lateksowych wynosi około 2%; jednak ta statystyka nie przekłada się bezpośrednio na wskaźnik ciąży. Przy prawidłowym i konsekwentnym stosowaniu prezerwatywy są bardzo skuteczne w zapobieganiu ciąży.

Ochrona przed STI: Prezerwatywy lateksowe zmniejszają ryzyko przeniesienia infekcji przenoszonych drogą płciową (STI), tworząc barierę przed źródłem zakażenia.

Prezerwatywy lateksowe są najskuteczniejsze w przypadku STI przenoszonych przez kontakt z żołądździą prącia, takich jak HIV.

Prezerwatywy lateksowe są mniej skuteczne wobec STI przenoszonych przez kontakt z zakażoną skórą, której prezerwatywa nie pokrywa, takich jak opryszczka.

Jeśli podejrzewasz, że masz STI, skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia.

Podsumowania bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej dostępne są na życzenie u naszego zespołu obsługi klienta.

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Data opracowania instrukcji używania: Rev 04 (06/2024)