

AVVERTENZE e INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per i preservativi **Durex Real Feel** e **Durex Invisible** contenuti in **Durex Pure Sensation**

AVVERTENZE

Durex Real Feel sono realizzati in poliisoprene. Questo è un materiale senza lattice quindi i preservativi Durex Real Feel sono ideali per le persone allergiche alle proteine del lattice di gomma naturale. I nostri test dimostrano che i preservativi Durex Real Feel riducono al minimo la probabilità di incorrere in casi di ipersensibilità ritardata (definiti anche come “reazioni allergiche di tipo IV”, ovvero “dermatiti da contatto”). Tuttavia, alcune persone sensibili al lattice potrebbero comunque mostrare sensibilità anche verso questi preservativi. In caso di irritazione o reazione allergica, interrompere l'uso di questi preservativi e consultare un medico.

Durex Invisible sono realizzati in lattice di gomma naturale, che può causare reazioni allergiche fra cui shock anafilattico nel caso in cui l'utilizzatore sia allergico al lattice.

INTERROMPERE L'UTILIZZO: se si avverte fastidio o irritazione durante l'utilizzo del preservativo. Il preservativo è monouso. Il riutilizzo può aumentare il rischio di infezioni o gravidanze indesiderate. In caso di sesso orale in fase preliminare, utilizzare un nuovo preservativo per le fasi successive del rapporto. Utilizzare solo lubrificanti consigliati per l'uso combinato con i preservativi. I lubrificanti a base oleosa (derivati del petrolio, olii per bambini e ovuli vaginali) ed alcuni prodotti topici che vengono applicati sul pene o sulla vagina possono danneggiare il preservativo. In caso di sesso anale applicare in aggiunta un lubrificante sulla parte esterna del preservativo (non usare Durex Fresh o Lovers Connect). Ricorda che nessun metodo contraccettivo garantisce una protezione al 100% da gravidanze indesiderate, HIV o infezioni sessualmente trasmissibili. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PRIMA DELL'UTILIZZO

Prima di usare il preservativo, controllare la data di scadenza riportata sull'involucro. Se l'involucro è visibilmente danneggiato, non utilizzare il preservativo e sostituirlo con uno proveniente da un involucro integro. Indossare il preservativo sul pene eretto, prima che lo stesso entri in contatto con il partner. Ciò aiuta ad evitare gravidanze indesiderate e la possibilità di contrarre infezioni sessualmente trasmissibili.

QUANDO CONSULTARE UN MEDICO O UN FARMACISTA

Rivolgersi ad un medico o ad un farmacista in caso di possibile allergia al lattice o irritazione/fastidio persistenti dopo l'uso o se si utilizzano medicinali topici sul pene o sulla vagina. In caso di perdite o rottura del preservativo durante l'uso o sensazione di bruciore durante il rapporto, consultare un medico o un farmacista il prima possibile ed entro 72 ore.