



Descripción general del producto y uso previsto

El uso previsto de este producto es la anticoncepción y la prevención de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Este producto está destinado a ser utilizado por la población sexualmente activa.

Antes de comenzar

Antes de usar este preservativo, comprueba la fecha de caducidad en el envoltorio. No utilices el preservativo si los materiales están pegajosos o quebradizos. Si el envoltorio individual del preservativo está claramente dañado, tíralo y utiliza uno nuevo de un envase no dañado. Coloca el preservativo antes de que el pene toque a otra persona. Esto ayuda a prevenir el embarazo y la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual durante el sexo vaginal, anal u oral.

Cómo usar tu preservativo

Abre con cuidado el envoltorio, asegurándote de no dañar el preservativo. Evita dañar el preservativo con las uñas u objetos puntiagudos.

Con el reborde del preservativo hacia el exterior, aprieta la punta y coloca el preservativo sobre la punta del pene erecto.

Desenróllalo hacia la base. Si el preservativo no se desenrolla, podría estar al revés; descártalo y usa uno nuevo. Detente y comprueba si notas que el preservativo se desprende o está demasiado apretado en el pene, ya que esto podría provocar su rotura. Tras la eyaculación, el preservativo debe ser retirado. El preservativo deberá ser sostenido firmemente en la base del pene antes de retirarlo.

Desecha el preservativo usado y su envoltorio a la basura. Por favor, no lo tires al inodoro.

Precauciones

Utiliza solo lubricantes a base de silicona. No utilices lubricantes a base de agua, ya que pueden dañar el preservativo. Algunos medicamentos tópicos que se aplican en el pene o la vagina pueden dañar los preservativos.

DEJA DE USARLO: si sientes molestias o irritación al usar el preservativo. Utiliza el preservativo una sola vez. La reutilización puede aumentar el riesgo de rotura e infecciones.

Los preservativos pueden presentar peligro de asfixia. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Los preservativos pueden utilizarse durante el sexo vaginal, anal u oral. Si usas el preservativo primero para sexo oral, debes utilizar uno nuevo para cualquier otro tipo de

relación sexual posterior. Para el sexo anal, utiliza lubricación adicional en la parte externa del preservativo.

Cuándo pedir consejo

Consulta con tu médico o farmacéutico si experimentas una reacción alérgica o si la irritación o las molestias persisten después del uso, o bien si estás utilizando medicamentos tópicos en el pene o la vagina.

Si el preservativo se rompe o tiene fugas durante el sexo, consulta a un farmacéutico o un médico tan pronto como sea posible y durante las primeras 72 horas.

Los incidentes graves deben ser reportados a Reckitt y a la autoridad local competente, que proporcionará más asesoramiento.

AVISO SOBRE ALERGIA AL LÁTEX EN DUREX CONEXIÓN TOTAL

Se trata de un material sin látex, por lo que son adecuados para las personas alérgicas a las proteínas del látex de caucho natural. Aún así, algunas personas sensibles al látex también pueden tener sensibilidad a estos preservativos. Si experimentas irritación o tienes alguna reacción alérgica, deja de utilizarlos y acude al médico. Recuerda que ningún método anticonceptivo funciona al 100% contra el embarazo, el VIH o las infecciones de transmisión sexual. Si sospechas que tú o tu pareja podéis estar embarazados o infectados, consulta inmediatamente a un médico. Los preservativos pueden presentar peligro de asfixia. Manténgase fuera del alcance de los niños

Fabricante: Innolates (Thailand) Limited. E1-6 Export Processing Zone, Southern Industrial Estate, Village 4, Chalung Sub-district, Hat Yai District, Songkhla 90110, Thailand

Fecha de la revisión de la IFU: T-IFU-05 (v.5) 10/03/2025