



Instructies voor gebruik

Het beoogde gebruik van dit product is anticonceptie en het voorkomen van de overdracht van seksueel overdraagbare aandoeningen. Houd er rekening mee dat geen enkele anticonceptiemethode 100% bescherming biedt tegen zwangerschap, hiv of seksueel overdraagbare infecties.

Performa™ siliconenglijmiddel bevat 5% benzocaïne, een lokaal anestheticum dat helpt om het vrijen langer te laten duren. Bevat een geneesmiddel.

Voor u begint

Controleer vóór gebruik van dit condoom de vervaldatum op de verpakking. Als de individuele verpakking duidelijk beschadigd is, gooi het condoom dan weg en gebruik een nieuw condoom uit een onbeschadigde verpakking. Breng het condoom aan voordat de penis in contact komt met de andere persoon. Dit helpt zwangerschap en de kans op overdracht van seksueel overdraagbare infecties tijdens vaginaal, anaal of oraal seksueel contact te voorkomen. Raadpleeg bij zwangerschap of borstvoeding een zorgverlener vóór gebruik.

Zo gebruikt u het condoom

Scheur de verpakking open langs de gekartelde rand. Wees voorzichtig: vingernagels of scherpe voorwerpen kunnen het condoom beschadigen.

Zorg ervoor dat de rol zich aan de buitenkant bevindt, knijp het reservoir samen en plaats het condoom op de top van de stijve penis.

Rol het condoom af tot aan de basis. Als het condoom niet afrolt, is het mogelijk verkeerd om geplaatst. Gooi het weg en gebruik een nieuw condoom. Stop en controleer of het condoom niet afglijdt of te strak zit, want dit kan tot scheuren leiden. Verwijder het condoom zo snel mogelijk na de zaadlozing. Houd het condoom stevig vast aan de basis van de penis voordat u zich terugtrekt.

Gooi de folie en het gebruikte condoom in de vuilnisbak. Niet doorspoelen in het toilet.

Contra-indicaties

Dit condoom is gemaakt van natuurlijk rubberlatex en bevat benzocaïne. Als u een bekende allergie heeft voor latex of benzocaïne, gebruik dit condoom dan niet, aangezien dit allergische reacties kan veroorzaken, waaronder anafylactische shock.

Waarschuwingen

STOP MET HET GEBRUIK: als u ongemak of irritatie ervaart tijdens het gebruik van condooms. Gebruik elk condoom slechts één keer. Hergebruik verhoogt het risico op falen of infectie. Condoos kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Buiten het bereik van kinderen houden. Als u het condoom eerst voor orale seks gebruikt, gebruik dan een nieuw condoom voor elke daaropvolgende seksuele handeling.

Gebruik uitsluitend glijmiddelen die geschikt zijn voor gebruik met condooms.

Glijmiddelen op oliebasis (zoals vaseline, babyolie en sommige vaginale zetpillen) en bepaalde plaatselijke geneesmiddelen die op penis of vagina worden aangebracht, kunnen condooms beschadigen. Gebruik bij anale seks extra glijmiddel (gebruik hiervoor geen Durex Tingle of Embrace) op de buitenkant van het condoom. Raadpleeg uw arts of apotheker als u twijfelt of u allergisch bent voor latex, als irritatie of ongemak aanhoudt na gebruik, of als u plaatselijke geneesmiddelen gebruikt. Raadpleeg zo snel mogelijk en binnen 72 uur een arts of apotheker als een condoom lekt of scheurt tijdens het vrijen. Voortijdige zaadlozing is een veelvoorkomend probleem met uiteenlopende oorzaken waarvoor mogelijk medische begeleiding nodig is. Raadpleeg uw arts als deze condooms niet helpen.

Bij sommige mensen kan het benzocaïnehoudende Performa™-glijmiddel in deze condooms huiduitslag, irritatie, branderig gevoel of jeuk veroorzaken. Vermijd contact met de ogen en was het product af na gebruik. Stop met gebruik bij irritatie. Raadpleeg een arts als de klachten aanhouden. Gebruik deze condooms niet als u of uw partner een ontstoken of beschadigde huid heeft. **STOP HET GEBRUIK ONMIDDELIJK EN RAADPLEEG EEN ARTS** als u of uw partner ademhalingsproblemen krijgt of blauwe lippen ontwikkelt.

Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan Reckitt en aan de bevoegde lokale autoriteit, die verder advies zal verstrekken.

Condoomfalen: het klinische falingspercentage van latex condooms bedraagt ongeveer 2%; deze statistiek correleert echter niet rechtstreeks met het zwangerschapspercentage.

Bij correct en consequent gebruik zijn condooms zeer effectief in het voorkomen van zwangerschap.

Bescherming tegen soa's: latex condooms verminderen het risico op overdracht van seksueel overdraagbare infecties (soa's) door een barrière te vormen tegen de infectiebron.

Latex condooms zijn het meest effectief tegen soa's die worden overgedragen via contact met de top van de penis, zoals hiv.

Latex condooms zijn minder effectief tegen soa's die worden overgedragen via contact met geïnfecteerde huid die niet door een condoom wordt bedekt, zoals herpes.

Neem contact op met een zorgverlener als u vermoedt dat u een soa heeft.

De samenvatting van veiligheid en klinische prestaties is op verzoek verkrijgbaar via onze Customer Care-afdeling (telefoonnummer: +32 (0)2 456 99 61).

Fabricant légal : Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Date de publication des instructions d'utilisation : Rev 04 (06/2024)