

Den tilsigtede brug af dette produkt er til prævention samt til forebyggelse af overførsel af seksuelt overførte sygdomme. Husk, at ingen præventionsmetode beskytter dig 100 % mod graviditet, HIV eller seksuelt overførte infektioner.

Performa™ silikoneglidecreme indeholder 5 % benzocain, som er et lokalbedøvende middel, der får ham til at holde længere. Indeholder et lægemiddelstof.

FØR DU STARTER

Før du bruger dette kondom, skal du tjekke udløbsdatoen på indpakningen. Hvis den enkelte pakning er tydeligt beskadiget, skal du kassere den og bruge et nyt fra en ubeskadiget pakning. Tag kondomet på, før din penis berører den anden person. Dette hjælper med at forhindre graviditet og risikoen for at få en seksuelt overført infektion under vaginal-, anal- eller oralsex. Tal med lægen før brug, hvis du er gravid eller ammer.

SÅDAN BRUGER DU KONDOMET

1. Riv indpakningen op fra den takkede kant. Vær forsigtig med kondomet, det kan blive beskadiget af fingernegle eller skarpe genstande.
2. Med det oprullede kondom ude, klem på reservoiret og anbring kondomet på spidsen af den erigerede penis.
3. Rul kondomet ned til bunden af penis. Hvis kondomet ikke ruller ud, kan det sidde på omvendt. Smid det ud og brug et nyt. Stop op og tjek, om kondomet glider af eller sidder for stramt på penis, da det kan føre til, at det går i stykker. Tag kondomet af kort tid efter sædafgang. Hold fast i kondomet ved bunden af penis, inden du trækker dig ud.
4. Smid folieindpakningen og det brugte kondom i skraldespanden. Skyl det ikke ud i toilettet.

KONTRAINDIKATIONER

Dette kondom er fremstillet af naturgummilatex og indeholder benzocain. Hvis du har kendt allergi over for latex eller benzocain, må du ikke bruge dette kondom, da det kan forårsage allergiske reaktioner, herunder anafylaktisk chok.

ADVARSLER

STOP MED AT BRUGE KONDOMET: Hvis du føler ubehag eller irritation, mens du bruger kondomet. Brug kun kondomet én gang. Genbrug kan øge risikoen for svigt eller infektion. Kondomer kan indebære en kvælningsrisiko. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis du bruger kondomet til oralsex først, bør du bruge et nyt kondom til enhver anden form for sex, der følger.

Brug kun glidecremer, der anbefales til brug sammen med kondomer. Oliebaserede produkter (vaseline, babyolie og visse pessarer) samt visse lokale lægemidler, der påføres penis eller vagina, kan beskadige kondomer. Til analsex skal du bruge ekstra

glidecreme (brug ikke Durex Tingle eller Embrace) på kondomets yderside. Tal med din læge eller apoteket, hvis du er usikker på, om du er allergisk over for latex, hvis du oplever vedvarende irritation eller ubehag efter brug, eller hvis du bruger lokale lægemidler på penis eller i vagina. Hvis kondomet lækker eller brister under sex, skal du kontakte din læge eller apoteket så hurtigt som muligt og inden for 72 timer. For tidlig sædafgang er et almindeligt problem, som kan have mange årsager og kan kræve lægekonsultation/-tilsyn. Hvis disse kondomer ikke hjælper, er det umagen værd at konsultere din læge.

Hos nogle kan Performa™-glidecremen på disse kondomer fremkalde udslæt, irritation, svien eller kløe. Pas på ikke at få det i øjnene, og vask det af efter brug. Hvis du oplever irritation, skal du stoppe med at bruge Mutual Climax. Rådfør dig med din læge, hvis det ikke bliver bedre. Brug ikke disse kondomer, hvis du eller din partner har betændt eller beskadiget hud. **STOP BRUGEN ØJEBLIKELIGT OG RING TIL EN LÆGE:** Hvis du eller din partner oplever vejrtrækningsbesvær eller får blå læber, når i bruger disse kondomer.

Alvorlige hændelser skal rapporteres til Reckitt og den lokale kompetente myndighed, som vil give yderligere rådgivning.

Bristet kondom: Den kliniske frekvens af bristede latexkondomer er 2 %. Denne statistik korrelerer dog ikke direkte med graviditetsfrekvensen.

Når kondomer bruges rigtigt og konsekvent, er de yderst effektive til at forhindre graviditet.

Beskyttelse mod seksuelt overførte infektioner: Latexkondomer reducerer risikoen for seksuelt overførte infektioner, fordi de udgør en barriere mod smitekilden.

Latexkondomer er mest effektive mod seksuelt overførte infektioner, der spredes via kontakt med penishovedet, som fx HIV.

Latexkondomer er mindre effektive mod seksuelt overførte infektioner, der spredes ved kontakt med inficeret hud, som ikke er dækket af kondomet, som fx herpes.

Hvis du tror, du har en seksuelt overført infektion, skal du kontakte en læge.

+45 44449701

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

REV 04(06/2024)