



PRODUKTÜBERSICHT UND VORGESEHENE ANWENDUNG

Der Verwendungszweck dieses Produkts ist die Empfängnisverhütung und die Vorbeugung gegen eine Übertragung sexuell übertragbarer Krankheiten.

Denke daran, dass keine Verhütungsmethode zu 100 % vor Schwangerschaft, HIV oder sexuell übertragbaren Krankheiten schützt.

GLEITGEL

Mit Silikongleitgel (außen) und 5 % benzocainhaltigem Gel (Lokalanästhetikum) in der Kondomspitze für länger andauerndes Sexvergnügen.

Enthält eine medizinische Substanz.

BEVOR IHR ANFANGT

Überprüfe vor der Verwendung das Verfallsdatum auf der Verpackung. Ist die Kondomfolie offensichtlich beschädigt, wirf das Kondom weg und benutze ein neues aus einer unbeschädigten Verpackung. Ziehe das Kondom über, bevor der Penis die andere Person berührt. Dies hilft, eine Schwangerschaft zu verhindern und reduziert die Gefahr einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten beim vaginalen, analen oder oralen Sex. Falls du schwanger bist oder stillst, frage vor der Anwendung einen Arzt oder Apotheker.

SO BENUTZT DU DAS KONDOM

Reiße die Verpackung an der gezackten Kante auf. Sei vorsichtig, Fingernägel oder scharfe Gegenstände können das Kondom beschädigen.

Halte das Kondom mit dem aufgerollten Rand nach außen, drücke das Reservoir zusammen und setze das Kondom auf die Spitze des erigierten Penis auf.

Rolle das Kondom vollständig bis zum Schaft ab. Wenn sich das Kondom nicht abrollen lässt, ist es möglicherweise verkehrt herum aufgesetzt – entsorge dieses und verwende ein neues. Prüfe, ob es abrutscht oder zu fest sitzt, da dies das Kondom beschädigen kann. Das Kondom so bald wie möglich nach der Ejakulation abstreifen. Halte das Kondom am Schaft fest, bevor der Penis herausgezogen wird.

Wirf die Folie und das benutzte Kondom in einen Mülleimer, nicht ins WC.

WARNHINWEISE

Dieses Kondom besteht aus Naturkautschuklatex und enthält Benzocain, was bei Latex- und Benzocain-Allergikern allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auslösen kann.

STOPPE DIE BENUTZUNG: Wenn du während der Benutzung Unwohlsein oder Reizungen verspürst. Benutze jedes Kondom nur einmal. Eine Wiederverwendung erhöht das Risiko einer Beschädigung oder Infektion. Kondome können eine Erstickungsgefahr darstellen. Außerhalb der Reichweite von

Kindern aufbewahren. Wenn du das Kondom zunächst für Oralsex benutzt, verwende für jede folgende Sexpraktik ein neues Kondom.

Benutze nur Gleitmittel, die für die Verwendung mit Kondomen empfohlen werden. Gleitmittel auf Ölbasis (Vaseline, Babyöl und einige vaginalen Zäpfchen) sowie einige topische Medikamente zur äußeren Anwendung, die auf Penis oder Vagina aufgetragen werden, können Kondome beschädigen. Benutze für Analsex zusätzliches Gleitgel auf der Außenseite des Kondoms (kein Durex Prickelnd).

Sprich mit einem Arzt oder Apotheker, wenn du dir nicht sicher bist, ob eine Latexallergie besteht, nach Verwendung Reizungen oder Unwohlsein auftreten, oder du topische Medikamente verwendest, die lokal auf Penis oder Vagina aufgetragen werden. Wenn ein Kondom beim Sex ausläuft oder platzt, konsultiere so bald wie möglich (spätestens innerhalb von 72 Stunden) einen Arzt oder Apotheker. Vorzeitiger Samenerguss ist ein häufiges Problem, das viele Ursachen haben kann und möglicherweise ärztliche Beratung/Überwachung erfordert. Wenn diese Kondome nicht helfen, solltest du deinen Arzt konsultieren.

Bei manchen Menschen kann das benzocainhaltige Gel, das in der Kondomspitze enthalten ist, einen Ausschlag, Reizung, Brennen oder Juckreiz verursachen. Kontakt mit den Augen vermeiden und nach der Anwendung abwaschen. Bei Reizung das Produkt nicht mehr anwenden. Wenn keine Besserung eintritt, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Benutze diese Kondome nicht, wenn du oder dein(e) Partner(in) entzündete Hautstellen oder Wunden hast. **STOPPE SOFORT DIE VERWENDUNG UND RUFE EINEN ARZT AN:** Wenn du oder dein(e) Partner(in) bei der Verwendung des Kondoms Atembeschwerden hast oder blaue Lippen bekommst.

Schwerwiegende Vorfälle können Reckitt und der zuständigen Behörde vor Ort gemeldet werden, die dann weitere Ratschläge erteilen.

Die klinische Versagensrate von Latexkondomen liegt bei etwa 2 %; diese Statistik korreliert jedoch nicht direkt mit der Schwangerschaftsrate. Wenn sie korrekt und konsequent verwendet werden, sind Kondome sehr effektiv bei der Verhinderung einer Schwangerschaft. STI-Schutz: Latexkondome verringern das Risiko der Übertragung von sexuell übertragbaren Infektionen (STIs), indem sie eine Barriere gegen die Infektionsquelle bieten. Latexkondome sind am wirksamsten gegen STIs, die durch Kontakt mit der Spitze des Penis übertragen werden, wie zum Beispiel HIV. Latexkondome sind weniger wirksam gegen STIs, die durch Kontakt mit infizierter Haut, die nicht von einem Kondom bedeckt ist, verbreitet werden, wie zum Beispiel Herpes. Wenn du glaubst, eine STI zu haben, kontaktiere einen Arzt oder Apotheker.

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

RB NL Brands B.V., Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL

Rev 04 (06/2024)