



### **Présentation et destination du produit**

Ce produit est destiné à un usage contraceptif et de prévention de la transmission des maladies sexuellement transmissibles. Aucune méthode de contraception ne peut garantir une protection efficace à 100% contre une grossesse, le VIH (Sida) ou les autres infections sexuellement transmissibles.

Le gel Performa™ à base de silicone contient 5% de benzocaïne, un anesthésiant local qui aide à prolonger la durée du rapport. Contient une substance médicinale.

### **Avant utilisation**

Avant d'utiliser ce préservatif, vérifier la date d'expiration sur l'emballage du préservatif. Si l'emballage est endommagé, jeter le préservatif et en utiliser un nouveau provenant d'un emballage non endommagé. Mettre le préservatif avant tout contact entre le pénis et le corps du partenaire, afin de prévenir une grossesse et la transmission d'infections sexuellement transmissibles lors des rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, demandez conseil à un professionnel de santé avant d'utiliser ces préservatifs.

### **Conseils d'utilisation**

Déchirer l'emballage à partir du côté dentelé. Attention à ne pas endommager le préservatif avec vos ongles ou un objet coupant.

S'assurer que la partie à dérouler est à l'extérieur. Saisir soigneusement entre les doigts le haut du préservatif (réservoir) et placer le préservatif sur le bout du pénis en érection.

Dérouler complètement le préservatif le long du pénis. Si le préservatif ne se déroule pas correctement, il est peut-être à l'envers. Jetez-le et utilisez-en un nouveau. Avant de continuer, vérifier que le préservatif ne glisse pas ni ne serre de manière excessive le pénis car il pourrait se déchirer. Se retirer juste après l'éjaculation. Pour cela, se retirer en tenant le préservatif fermement à la base du sexe.

Jeter le préservatif à la poubelle. Ne pas jeter dans les toilettes.

### **Contre-indications**

Ce préservatif est produit à partir de latex de caoutchouc naturel et contient de la benzocaïne. Si vous êtes allergique au latex ou à la benzocaïne, n'utilisez pas ce préservatif car il pourrait provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique.

### **Quelques précautions**

ARRETER L'UTILISATION d'un préservatif Durex si vous ou votre partenaire ressentez la moindre gêne ou irritation. Un préservatif ne s'utilise qu'une seule fois, le réutiliser augmente le risque de rupture ou d'infection. Les préservatifs peuvent présenter un risque d'étouffement. Maintenir hors de portée des enfants. Si vous utilisez d'abord le préservatif pour un usage oral, utilisez un nouveau préservatif pour tout autre rapport sexuel suivant.

Utiliser uniquement les lubrifiants compatibles avec les préservatifs. Les lubrifiants à base d'huile tels que la vaseline, huile pour bébé et certains anneaux pessaires peuvent endommager les préservatifs, tout comme certains médicaments appliqués sur le pénis ou le vagin. Pour un usage anal, il est recommandé d'ajouter du lubrifiant (ne pas utiliser Durex Tingle pour un rapport anal). Le lubrifiant s'applique toujours sur l'extérieur du préservatif.

Consultez un médecin ou pharmacien si : vous ignorez si vous êtes allergiques au latex ou si une gêne/irritation persiste après l'utilisation des préservatifs ; vous utilisez des médicaments appliqués sur le pénis ou le vagin ; un préservatif se déchire ou se perce pendant l'utilisation (le faire le plus rapidement possible et dans les 72h). L'éjaculation précoce est un problème courant, qui peut avoir de nombreuses causes et peut nécessiter une consultation/supervision médicale. Si ces préservatifs ne vous aident pas, consultez votre médecin.

Chez certaines personnes, le gel Performa™ présent dans ces préservatifs peut provoquer des réactions comme des éruptions cutanées, irritations, brûlures ou des

démangeaisons. Evitez tout contact avec les yeux. Se laver après utilisation. Si vous ressentez une irritation, arrêtez d'utiliser ces préservatifs. Si l'irritation persiste, consultez votre médecin. N'utilisez pas ces préservatifs si vous ou votre partenaire avez une peau irritée. **ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION ET APPELEZ UN MÉDECIN :** si vous ou votre partenaire éprouvez des difficultés respiratoires ou avez les lèvres bleues lorsque vous utilisez ces préservatifs.

Tout incident grave doit être signalé à Reckitt et aux autorités locales compétentes qui fourniront des conseils supplémentaires.

### **Performance clinique**

Défaillance du préservatif : Le taux de défaillance clinique des préservatifs en latex est d'environ 2 % ; cependant, cette statistique n'est pas directement corrélée au taux de grossesse.

Lorsqu'ils sont utilisés correctement et systématiquement, les préservatifs sont très efficaces pour prévenir une grossesse.

Protection contre les IST : Les préservatifs en latex réduisent le risque de transmission d'infections sexuellement transmissibles (IST) en fournissant une barrière contre la source de l'infection.

Les préservatifs en latex sont plus efficaces contre les IST qui se propagent par contact avec la tête du pénis, comme le VIH.

Les préservatifs en latex sont moins efficaces contre les IST qui se propagent par contact via une peau infectée non couverte par un préservatif, comme l'herpès.

Si vous pensez avoir une IST, contactez un médecin.

Les résumés de sécurité et de performance clinique sont disponibles sur demande auprès de notre service consommateurs (+33(0)8 01 84 13 95).

**Fabricant légal :** Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

**Date de publication des instructions d'utilisation :** Rev 04 (06/2024)