



L'indicazione d'uso di questo prodotto è la contraccezione e la prevenzione della trasmissione di malattie sessualmente trasmissibili. Ricorda che nessun metodo contraccettivo garantisce una protezione al 100% da gravidanze indesiderate, HIV o infezioni sessualmente trasmissibili. Con lubrificante Performa™ a base siliconica contenente benzocaina al 5% (anestetico locale) per prolungare il piacere. Contiene una sostanza medicinale.

PRIMA DELL'UTILIZZO

Prima di usare il preservativo, controllare la data di scadenza riportata sull'involucro. Se l'involucro è visibilmente danneggiato, non utilizzare il preservativo e sostituirlo con uno proveniente da un involucro integro. Indossare il preservativo sul pene eretto, prima che lo stesso entri in contatto con il partner. Ciò aiuta ad evitare gravidanze indesiderate e la possibilità di contrarre malattie sessualmente trasmissibili durante il sesso vaginale, anale o orale. In caso di gravidanza o allattamento consultare un medico prima dell'uso.

COME UTILIZZARE IL PRESERVATIVO

1. Aprire l'involucro dal bordo ondulato. Maneggiare con cura il preservativo, in quanto potrebbe danneggiarsi con unghie o oggetti affilati.
2. Mantenendo la parte da srotolare all'esterno, stringere il serbatoio tra due dita e posizionare il preservativo sulla punta del pene eretto.
3. Srotolarlo fino alla base. Se il preservativo non si srotola, potrebbe essere al contrario; gettarlo e usarne uno nuovo. Fermarsi e controllare se si ha la sensazione che il preservativo si stia sfilando o sia troppo stretto per evitarne la rottura. Sfilare il preservativo subito dopo l'eiaculazione. Tenere il preservativo saldo alla base del pene prima di estrarlo.
4. Gettare l'involucro ed il preservativo utilizzato in un bidone dei rifiuti. Non gettare nel WC.

CONTROINDICAZIONI

Questo preservativo è realizzato in lattice di gomma naturale e contiene Benzocaina. Nel caso in cui l'utilizzatore sia allergico al lattice o alla Benzocaina, non utilizzare questo preservativo, in quanto potrebbe causare reazioni allergiche, fra cui shock anafilattico.

AVVERTENZE

INTERROMPERE L'UTILIZZO : se si avverte fastidio o irritazione durante l'utilizzo del preservativo. Il preservativo è monouso. Il riutilizzo può aumentare il rischio di infezioni o gravidanze indesiderate. I preservativi possono causare rischio di soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di sesso orale, durante i preliminari, utilizzare un nuovo preservativo per le fasi successive del rapporto. Utilizzare solo lubrificanti consigliati per l'uso combinato con i preservativi. I lubrificanti a base oleosa (derivati del petrolio, oli per bambini e ovuli vaginali) ed alcuni medicinali topici che vengono applicati sul

pene o sulla vagina possono danneggiare il preservativo. In caso di sesso anale applicare in aggiunta un lubrificante sulla parte esterna del preservativo (non utilizzare il gel lubrificante Durex Fresh).

QUANDO CONSULTARE UN MEDICO O UN FARMACISTA

Rivolgersi ad un medico o ad un farmacista in caso di possibile allergia al lattice, irritazione o fastidio persistente dopo l'uso o se si utilizzano medicinali topici sul pene o sulla vagina.

In caso di perdite o rottura del preservativo durante l'uso o sensazione di bruciore durante il rapporto, consultare un medico o un farmacista il prima possibile ed entro 72 ore.

L'iaculazione precoce è un problema comune, che può avere diverse cause e potrebbe richiedere un controllo medico. Se tale condizione dovesse persistere anche con l'uso di questi preservativi, è utile rivolgersi ad un medico. Ad alcune persone il lubrificante Performa™ con Benzocaina contenuto in questi preservativi può causare eruzioni cutanee, irritazioni, bruciore o prurito. Evitare il contatto con gli occhi e lavare via il lubrificante dopo l'uso. In caso di irritazione, interrompere l'utilizzo di Durex Sync/Durex Lunga Durata. Se non ci sono miglioramenti, consultare un medico. Non usare questi preservativi se tu o il tuo partner avete la pelle lesa o infiammata. **INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO E CONTATTARE UN MEDICO:** Se tu o il tuo partner avvertite difficoltà respiratorie o se le vostre labbra assumono una colorazione blu durante l'uso di questi preservativi. Incidenti gravi devono essere riportati a Reckitt e alle autorità locali competenti, le quali provvederanno a fornire ulteriori istruzioni.

LIVELLO DI PROTEZIONE DA GRAVIDANZE E IST

Fallimento del preservativo: il tasso di fallimento clinicamente testato dei preservativi in lattice di gomma naturale è di circa il 2%; tuttavia, questa statistica non è direttamente correlata al tasso di gravidanza. Se usati correttamente e abitualmente, i preservativi sono un metodo efficace per prevenire gravidanze indesiderate. Protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili (IST): i preservativi in lattice riducono il rischio di trasmissione di IST, fornendo una barriera contro la fonte dell'infezione. I preservativi in lattice di gomma naturale sono i più efficaci contro le infezioni sessualmente trasmissibili che si diffondono attraverso il contatto con la punta del pene, come l'HIV. I preservativi in lattice di gomma naturale sono meno efficaci contro le infezioni sessualmente trasmissibili che si diffondono per contatto attraverso la pelle infetta non protetta dal preservativo, come l'Herpes. Se ritieni di aver contratto una IST, contatta il tuo medico.

La Sintesi relativa alla Sicurezza e alla Prestazione Clinica (Summary of Safety and Clinical Performances, SSCP) è disponibile contattando il nostro Servizio Cortesia (numero telefonico: 800939388).

Fabbricante: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Data di revisione delle Istruzioni per l'uso: Rev 04 (06/2024)