



Účelom použitia tejto zdravotníckej pomôcky je antikoncepcia a prevencia prenosu pohlavne prenosných chorôb. Pamätajte, že žiadna metóda antikoncepcie nefunguje na 100% proti otehotneniu, HIV alebo pohlavne prenosným chorobám.

Lubrikant Performa™ obsahuje 5% benzokaín, lokálne anestetikum, ktoré mužom pomáha oddialiť vyvrcholenie. Obsahuje liečivú látku.

#### PRED POUŽITÍM

Pred použitím prezervatívu skontrolujte dátum jeho použiteľnosti na obale. Ak je obal prezervatívu zjavne porušený, prezervatív zlikvidujte a použite iný z nepoškodeného obalu. Nasadte si prezervatív pred tým, ako sa penis dotkne druhej osoby. Pomáha to zabrániť otehotneniu a možnosti nákazy sexuálne prenosnými infekciami počas vaginálneho, análneho alebo orálneho sexu. Ak ste tehotná alebo dojčíte - poraďte sa pred použitím s lekárom.

#### POUŽITIE PREZERVATÍVU

Otvorte fóliu odtrhnutím obalu od zúbkovanej hrany. S prezervatívom narábajte opatrne, pretože by ste ho mohli poškodiť nechtami alebo ostrými predmetmi.

So zrolovanou časťou zvonka stlačte rezervoár a nasadte prezervatív na vrchol stoporeného penisu.

Zrolujte dole smerom ku koreňu. Ak sa prezervatív nezroluje, môže byť naruby; vyhodte ho a použite nový. Počkajte a skontrolujte, či necítite, že sa prezervatív sklzáva alebo zvierá penis príliš tesne, pretože by to mohlo viesť k prasknutiu. Tesne po ejakulácii je potrebné prezervatív stiahnuť. Prezervatív pred vytiahnutím penisu pevne pridržiavajte pri koreni penisu.

Obal a použitý prezervatív vyhodte do koša. Nesplachujte do záchoda.

#### KONTRAINDIKÁCIE

Tieto prezervatívy sú vyrobené z prírodného kaučukového latexu, ktorý môže vyvolať

alergickú reakciu vrátane anafylaktického šoku, pokiaľ je užívateľ na latex alergický.

#### UPOZORNENIA

**PRESTAŇTE HO POUŽÍVAŤ** ak: cítite nepohodlie alebo podráždenie pri používaní prezervatívu. Prezervatív je iba na jedno použitie. Opätovné použitie môže zvýšiť riziko zlyhania alebo infekcie. Prezervatívy môžu predstavovať riziko udusenía. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak najprv použijete prezervatív na orálny sex, použite nový kód pre akýkoľvek iný typ sexu, ktorý nasleduje.

Používajte iba lubrikanty odporúčané na použitie s prezervatívami. Lubrikanty na báze oleja (vazelína, detský olej alebo niektoré lubrikanty na pesar) a niektoré lieky na vonkajšie použitie aplikované na penis alebo do vagíny môžu prezervatív poškodiť. Pri análnom sexe použite ďalšiu lubrikáciu (nepoužívajte Durex Tingle alebo Embrace) z vonkajšej strany prezervatívu. Poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak ste si nie istý, či nemáte alergiu na latex alebo po použití pretrvávajúce podráždenie či nepríjemný pocit alebo používate lieky na vonkajšie použitie aplikované na penis alebo do vagíny. Ak prezervatív pri použití presakuje alebo praskne, poradte sa so svojím lekárnikom alebo lekárom čo najskôr do 72 hodín. Predčasná ejakulácia je častý problém, ktorý môže mať mnoho príčin a môže vyžadovať lekársku konzultáciu. Ak tieto prezervatívy nepomáhajú, poradte sa so svojím lekárom.

Lubrikant Performa™ môže niektorým ľuďom spôsobovať vyrážku, podráždenie, pálenie alebo svrbenie. Zabráňte vniknutiu do očí a po použití ho umyte. Pokiaľ pocítite podráždenie, prestaňte prezervatívy používať. Pokiaľ sa nedostaví zlepšenie, navštívte svojho lekára. Nepoužívajte tieto prezervatívy, pokiaľ máte vy alebo vaša partnerka/váš partner zapálenú alebo porušenú kožu. **OKAMŽITE ICH PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ A ZATELEFONUJTE LEKÁROVI**, ak: vy alebo vaša partnerka/váš partner pocítite dýchacie ťažkosti alebo vám po používaní týchto prezervatívov zmodrajú pery.

Nežiaduce príhody musia byť nahlásené spoločnosti Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o. a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý poskytne ďalšie rady. Štúdia spoľahlivosti prezervatívov: Klinická miera zlyhania latexových prezervatívov je

približne 2 %; táto miera však priamo nesúvisí s pravdepodobnosťou otehotnenia.

Prezervatívy sú pri správnom a dôkladnom používaní veľmi účinným prostriedkom na ochranu pred otehotnením.

Ochrana pred pohlavne prenosnými chorobami: Latexové prezervatívy znižujú riziko prenosu pohlavne prenosných chorôb tým, že vytvárajú bariéru medzi zdrojom infekcie a kožou.

Latexové prezervatívy sú najúčinnnejšie proti pohlavne prenosným chorobám, ktoré sa šíria prostredníctvom kontaktu s hlavou penisu, ako napríklad HIV.

Latexové prezervatívy sú menej účinné proti pohlavne prenosným chorobám, ktoré sa šíria kontaktom cez infikovanú kožu, ktorá nie je krytá prezervatívom, ako je napríklad herpes.

Ak sa domnievate, že máte pohlavne prenosnú chorobu, kontaktujte svojho lekára.

Súhrn bezpečnosti a klinickej účinnosti je k dispozícii na vyžiadanie v našom zákazníckom servise.

Výrobca: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Dátum poslednej revízie návodu na použitie: Rev 04 (06/2024)