



Resumen del producto y uso previsto

El uso previsto de este producto es la anticoncepción y la prevención de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Recuerda que ningún método anticonceptivo funciona al 100% contra el embarazo, el VIH o las infecciones de transmisión sexual. El lubricante de silicona Performa™ contiene un 5% de benzocaina, un anestésico local que retrasa la eyaculación masculina. Contiene una sustancia medicinal.

Antes de comenzar

Antes de usar este preservativo, comprueba la fecha de caducidad en el envoltorio. Si el envoltorio individual del preservativo está claramente dañado, tíralo y utiliza uno nuevo de un envase no dañado. Coloca el preservativo antes de que el pene toque a otra persona. Esto ayuda a prevenir el embarazo y la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual durante el sexo vaginal, anal u oral. Si está embarazada o dando el pecho, consulte a un profesional de la salud antes de usarlo.

Cómo usar tu preservativo

Abre el envoltorio por el borde dentado. Manipula el preservativo con cuidado, ya que se puede dañar con las uñas u objetos puntiagudos. Con el reborde del preservativo hacia el exterior, aprieta la punta y coloca el preservativo sobre la punta del pene erecto. Desenróllalo hacia la base. Si el preservativo no se desenrolla, podría estar al revés, descártalo y usa uno nuevo. Detente y comprueba si notas que el preservativo se desprende o está demasiado apretado en el pene, ya que esto podría provocar su rotura. Tras la eyaculación el preservativo debe ser retirado. El preservativo deberá ser sostenido firmemente en la base del pene antes de retirar. Desecha el preservativo usado y su envoltorio a la basura. Por favor, no lo tires al inodoro.

Contraindicaciones

Este preservativo está hecho de látex de caucho natural y contiene benzocaína. Si tiene alergia al látex o a la benzocaína, no utilice este preservativo ya que podría causar reacciones alérgicas, incluyendo un shock anafiláctico.

Precauciones

DEJA DE USARLO: Si sientes molestias o irritación al usar el preservativo. Utiliza el preservativo una sola vez. La reutilización puede aumentar el riesgo de rotura e infecciones. Los preservativos pueden presentar peligro de asfixia. Manténgase fuera del alcance de los niños. Si primero utilizas el preservativo para el sexo oral, debes utilizar un preservativo nuevo para cualquier otro tipo de práctica sexual a continuación Solo usa lubricantes recomendados para el uso con preservativos. Aquellos de base oleosa (vaselina, aceite de bebé y algunos pesarios) u otros medicamentos tópicos que se apliquen al pene o la vagina pueden dañar los preservativos. Para el sexo anal usa lubricación adicional en el exterior del preservativo (no uses Durex Frescor ni Lovers Connect. Consulta con tu médico o farmacéutico si experimentas una reacción alérgica o si la irritación o las molestias persisten después del uso, o bien si estás utilizando medicamentos tópicos en el pene o la vagina. Si el preservativo se rompe o tiene fugas durante el sexo consulta a un farmacéutico o un médico tan pronto como sea posible y durante las primeras 72 horas. La eyaculación precoz es un problema común, que puede ser debido a causas que requieren atención médica. Si estos preservativos no te ayudan, consulta con tu médico. Para algunas personas el lubricante Performa™ de los preservativos Durex Placer Prolongado puede causar erupciones, irritación, ardor o picor. Evítase el contacto con los ojos. Límpiase después de su uso. Si sientes irritación, discontinúa su uso y si no experimentas mejoría, consulta a un médico. No utilices estos preservativos si tú o tu pareja tenéis la piel inflamada o agrietada. Si tú o tu pareja experimentáis dificultad respiratoria o se os ponen los labios azules mientras utilizáis estos preservativos, **DEJAD DE USARLO INMEDIATAMENTE Y LLAMAD AL MÉDICO** Los incidentes graves deben ser reportados a Reckitt y a la autoridad local competente que proporcionará más asesoramiento.

Desempeño clínico

Fallo del preservativo: La tasa de fallo clínico de los preservativos de látex es aproximadamente del 2%; sin embargo, esta estadística no se correlaciona directamente con la tasa de embarazo. Cuando se usan correcta y consistentemente, los preservativos son muy efectivos para prevenir el embarazo **Protección contra las ITS:** los preservativos de látex reducen el riesgo de transmitir infecciones de transmisión sexual (ITS) al proporcionar una barrera contra la fuente de infección. Los preservativos de látex son los más efectivos contra las ITS que se transmiten por contacto con el pene, como el VIH Los preservativos de látex son menos efectivos contra las ITS que se transmiten por contacto a través de la piel infectada que no está cubierta por el preservativo, como el herpes. Si cree que tiene una ITS, comuníquese con un proveedor de atención médica Para obtener un resumen de seguridad y desempeño clínico, incluida información adicional sobre las tasas de embarazo e ITS, consulte [durex.co.uk/pages/summary-of-safety-and-clinical-Performance](https://durex.co.uk/pages/summary-of-safety-and-clinical-performance).

Fabricante: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Fecha de emisión del IFU: Rev 04 (06/2024)